



[Link to english](#)

### DYNA ANPASSNINGSBAR

Anpassningsinstruktion:  
Dyna anpassningsbar

art.nr. 572BB20, 572BB25, 572BB34  
BB=sittbredd

Verktyg som behövs:

Vass mattkniv eller såg



1) Dyna ovanifrån.  
Öppna överdraget och drag ut skumplasten.




2) Mät på rullstolen vilket djup dynan ska ha och markera detta på skumplasten.



3) Kapa skumplasten med lämplig kniv alternativt såg. Placera tillbaka skumplasten i överdraget.

Till modell	Sittdjup	Art nr	Benämning	Avfasning	A	B	C	D
1. Micro Kort	15-20 cm	5722420	Dyna anpassningsbar d15-20 b24 h2,5	20*20	24cm		20cm	2,5cm
		5722720	Dyna anpassningsbar d15-20 b27 h2,5		27cm		20cm	2,5cm
		5752420	Dyna anpassningsbar d15-20 b24 h5		24cm		20cm	5cm
		5752720	Dyna anpassningsbar d15-20 b27 h5		27cm		20cm	5cm
2. Micro Lång Bambino kort	20-25cm	5722425	Dyna anpassningsbar d20-25 b24 h2,5	30*30	24cm	25cm		2,5cm
		5722725	Dyna anpassningsbar d20-25 b27 h2,5		27cm	25cm		2,5cm
		5752425	Dyna anpassningsbar d20-25 b24 h5		24cm	25cm		5cm
		5752725	Dyna anpassningsbar d20-25 b27 h5		27cm	25cm		5cm
3. S3 kort Abd S3 kort Bambino	25-30	5722734	Dyna anpassningsbar d25-35 b27 h2,5	40*40	27cm	35cm		2,5cm
		5723034	Dyna anpassningsbar d25-35 b30 h2,5		30cm	35cm		2,5cm
		5723334	Dyna anpassningsbar d25-35 b33 h2,5		33cm	35cm		2,5cm
		5752734	Dyna anpassningsbar d25-35 b27 h5		27cm	35cm		5cm
		5753034	Dyna anpassningsbar d25-35 b30 h5		30cm	35cm		5cm
		5753334	Dyna anpassningsbar d25-35 b33 h5		33cm	35cm		5cm

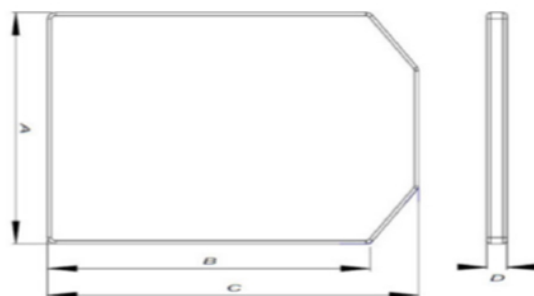

B mått sits	
Micro kort	15-20
Micro Lång	20-25
Bambino kort	20-25
Bambino	25-30
S3 kort abd	27-35

## CUSHION CUSTOM DEPTH



Instructions to adapt:  
Cushion custom depth

art.no. 572BB20, 572BB25, 572BB34

BB=seat width

Tools needed:

Sharp knife or a saw.



1) Cushion seen from above.  
Open cover and pull out the foam.




2) Measure aquired seat depth on the wheelchair and transfer that to the foam.



3) Cut along marking with a suitable knife or saw. Place the foam into the cover.

Model	Seat depth	Art nr	A	B	C	D	
1. Micro Short	15-20 cm	5722420 Cushion Adjustable d15-20 w24 h2,5	20*20	24cm		20cm	2,5cm
		5722720 Cushion Adjustable d15-20 w27 h2,5		27cm		20cm	2,5cm
		5752420 Cushion Adjustable d15-20 w24 h5		24cm		20cm	5cm
		5752720 Cushion Adjustable d15-20 w27 h5		27cm		20cm	5cm
2. Micro Long Bambino short	20-25cm	5722425 Cushion Adjustable d20-25 w24 h2,5	30*30	24cm	25cm		2,5cm
		5722725 Cushion Adjustable d20-25 w27 h2,5		27cm	25cm		2,5cm
		5752425 Cushion Adjustable d20-25 w24 h5		24cm	25cm		5cm
		5752725 Cushion Adjustable d20-25 w27 h5		27cm	25cm		5cm
3. S3 kort Abd S3 short Bambino	25-35 cm	5722734 Cushion Adjustable d25-35 w27 h2,5		27cm	35cm		2,5cm
		5723034 Cushion Adjustable d25-35 w30 h2,5		30cm	35cm		2,5cm
		5723334 Cushion Adjustable d25-35 w33 h2,5		33cm	35cm		2,5cm
		5752734 Cushion Adjustable d25-35 w27 h5		27cm	35cm		5cm
		5753034 Cushion Adjustable d25-35 w30 h5		30cm	35cm		5cm
		5753334 Cushion Adjustable d25-35 w33 h5		33cm	35cm		5cm

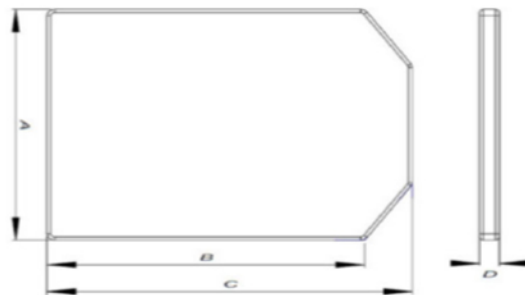

Dynor - mått

	B mått sits
Micro kort	15-20
Micro Long	20-25
Bambino short	20-25
Bambino	25-30
S3 short abd	27-35