



ARMSTÖD BAMBINO 3

Monteringsanvisning för:
Armstöd Bambino 3
art.nr. 4401402, 4401403

Armstödet monteras i sidoskydd 42350001 / 42350002

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 3 mm



1) Skruven, fjäder och mutter är förmonterad i sidoskyddet tillsammans med ändproppen (pos 5). För att montera armstödet måste ändpropp (pos 5) tas ur.
Skruva ut skruven (pos 2) på baksidan av sidoskyddet. Använd 3 mm insexnyckel. När det är gjort tas ändproppen ut ur sidoskyddet.
Man kan behöva en tunn mejsel el dyl för att trycka ut ändproppen underifrån



2) Armstödet trycks ner i det hål där ändproppen suttit. Placera mutter armstödsjustering (pos 4) i sitt spår på framsidan. Montera tillbaka fjäder (pos 3, bild 1) och insexskruv (pos 2) på baksidan, skruva bara in skruven några varv.



3) Armstödet är justerbart i höjd genom en fjäderspänd skruv, tre möjliga höjdlägen.
För att justera armstödet höjd, tryck in skruven på (pos 2), baksidan och skjut armstödet upp eller ner till önskad position.
När önskad position är uppnådd, släpp skruven, och känn hur armstödet "klickar i" önskat läge.
För att låsa positionen dra åt skruven helt.