

KÖRHANDTAG S3 HÖJ&SÄNK



Monteringsanvisning (justering sid 2) för:
Körhandtag S3 Höj&Sänk;
art.nr. 4252060

Verktyg som behövs:
Bits med Insex 4 mm och ev. spärrskaft
Nyckel 8 mm
Insexnyckel 2,5 mm



1) Öppna upp ena fästet och placera det runt ryggröret och passa in hålet i fästet över knoppen i ryggröret. Observera att det finns höger resp. vänster utförande av fästet.



2) Stoppa ner körhandtagsröret i fästet och spänn fast det.



3) Kläm ihop fästet så att det blir möjligt att passa in skruven. Drag skruven för hand några varv.



4) Drag slutligen åt skruven ordentligt med insex bits 4 mm monterad i ett spärrskaft.



5) Färdigmonterat.

JUSTERING AV LÅSARM



1) Om låsningen av körhandtaget är otillräcklig eller glapp kan man justera detta, enl. följande instruktion.




2) Demontera körhandtaget. Lossa på denna skruv några varv med insexnyckel 2.5mm.




3) Tryck ned skruven tills muttern på undersidan blir synlig.



4) Justera låskraften genom att vrida muttern moturs, uppifrån sett, för att öka låskraften och medurs för att minska den. Vrid muttern ett kvarts varv, skruva åt skruven och prova låskraften. Använd nyckel 8 mm.

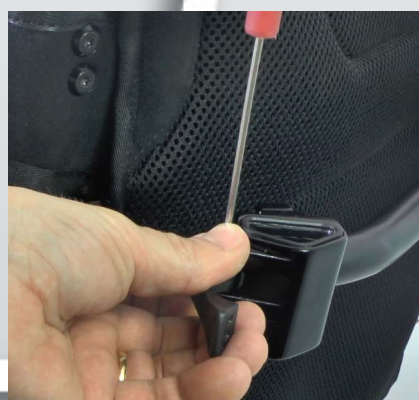

5) Drag åt skruven och se till att muttern glider in i fästet ordentligt.

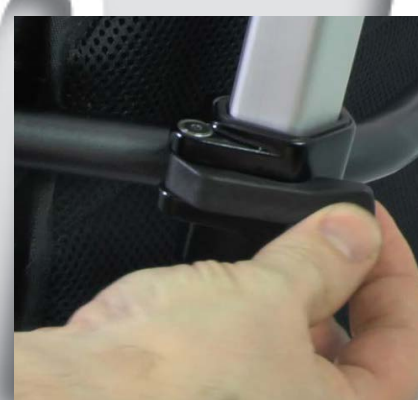

6) Montera körhandtaget och kontrollera att låskraften är tillräcklig. Behövs justering, upprepa steg 3-5.