

KÖRHANDTAG FÄLLBART S3



Monteringsanvisning för:
Körhandtag Fällbart S3;
art.nr. 4245000

Verktyg som behövs:
Skruvdragare med Bits för Insex 4 mm och
skruvmejsel.



1) Använd en mejsel och stick hål på plastpluggen i ryggstödsröret och dra sedan loss den..



2) Montera ena körhandtaget i ryggstöret och dra undan ryggklädseln för att blotta det gängade hålet.



3) Montera skruven i hålet och drag åt för hand ca 5 varv.



4) Drag slutligen åt skruven ordentligt med insex bits 4 mm monterad i t.ex. en skruvdragare.

Upprepa hela proceduren på andra sidan.



5) Färdigmonterat.