

# panthera®

Infoblad 2013-01

2013-03-15

## Nytt 24" standarddrivhjul

Fr.o.m. Mars 2013 kommer vi att successivt börja leverera våra rullstolar med ett nytt förbättrat 24" standarddrivhjul. Förbättringarna innebär en ännu starkare och styvare fälg samt en ny infästning av drivringen med 6 infästningspunkter som gör det möjligt att byta drivring utan att behöva demontera däck och slang, då skruvarna är åtkomliga från utsidan av fälgen.

Dessutom kommer alla drivringstyper att passa på ett och samma hjul, titan-, aluminium-, PRC-, geléplastade- och maxgreppdrivringar kommer alla att ha samma infästning och passa på det nya hjulet.

Navet är det samma som tidigare uppdaterades i Januari 2012. Det innebär också att det är samma quickreleaseaxel som tidigare. De nya hjulen passar alla stolar som det gamla hjulet passar till.

Äldre drivringar som passar det äldre standardhjulet kommer inte passa det nya då de har olika innerdiametrar på fälgen. Däremot kommer drivringar som passar till Spinergy hjulen att passa det nya standarddrivhjulet.

De nya hjulen passar till S2, S2 kort, S2 kort-låg, S2 large, S2 swing, S2 swing-kort, U2 och Bambino.

### Nya artikelnummer:

1300000	Drivhjul 24" 6P utan drivring
1300000R	Drivhjul 24" 6P utan drivring och däck
1300001	Drivhjul 24" 6P utan drivring med PU däck
1300010	Drivhjul 24" 6P Drivring Alu
1300010R	Drivhjul 24" 6P Drivring Alu utan däck
1300011	Drivhjul 24" 6P Drivring Alu med PU däck
1300020	Drivhjul 24" 6P Drivring Titan
1300020R	Drivhjul 24" 6P Drivring Titan utan däck
1300021	Drivhjul 24" 6P Dr.ring Tit PU med däck utan däck
1300030	Drivhjul 24" 6P Drivring MaxGr tunn
1300030R	Drivhjul 24" 6P Drivring MaxGr tunn utan däck
1300031	Drivhjul 24" 6P Drivring MG med PU däck
1300040	Drivhjul 24" 6P Drivring GelePlast
1300040R	Drivhjul 24" 6P Drivring GelePlast utan däck
1300041	Drivhjul 24" 6P Drivring GP med PU däck
1300050	Drivhjul 24" 6P Drivring PRC grå
1300050R	Drivhjul 24" 6P Drivring PRC grå utan däck

