

## Information om balansering av U3 light



U3 LIGHT



U2 LIGHT



### 4) Balansering [info](#)

- Position A**  
Minst lätt balanserad
  **Position B**  
Medel balanserad
  **Position C**  
**Mest** lätt balanserad
- Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge.  
"lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen.  
Positionen kan lätt ändras senare.

Beställnings guide U3 LIGHT [länk](#)

Ryggfästning:



Hål 1

Hål 2

Hål 3

**OBS!** Läs på nästa sida hur du kommer fram till rätt modell och balansering!

Beställnings guide U2 LIGHT [länk](#)

För information så vill vi upplysa om att på nya U3 light så är balanseringslägena omvända jämfört med gamla U2 light. Skillnaden beror på att ryggfästningen på U3 light har en annan teknisk lösning än på U2 light. Med "lätt balanserad" menas att rullstolen är lätt att köra upp på bakhjulen.

Position / Hål 1 på **U2 light** är **mest** lättippad

Position 1/ **A** på **U3 light** är **minst** lättippad

motsvarande motsats gäller då också på Hål 3 / Position **C**.

Hål 2 / Position **B** är lika.

För att minimera förväxling har vi döpt positionerna till **A**, **B** och **C** på nya **U3 light**.

Mer info om balansering på U3 Light jämfört med modell U3 finns att [LÄSA HÄR](#)