

Bruksanvisning för körhandtag H/S

Justering och användning av höj- och sänkbara körhandtag:

1. Aktivt läge. Lossa snabblåset. Vrid körhandtaget i rätt läge och dra upp det max. Dra åt snabblåset för att låsa körhandtaget i aktivläget (**bild 1**).
2. Transportläge. Körhandtaget kan sänkas ner och vridas så att den inte sticker ut så mycket. Detta gör du genom att lossa på snabblåset och skjuta ner handtaget. Dra åt snabblåset för att låsa körhandtaget i transportläge (**bild 2**).

OBS! Se alltid till att "knappen" är "ute". Den fungerar som ett säkerhets stopp.

Tips:

Om du vill kan du montera av handtagen (bara låta fästet sitta kvar) när du inte använder dem. Detta gör du lätt genom att lossa snabblåset och dra upp handtaget max, nu trycker du in "knappen" och drar upp handtaget. Glöm inte att dra åt snabblåset något så att detta inte lossnar.



Bild 1



Bild 2