

SIDOSKYDD S3



Monteringsanvisning för: Sidoskydd S3, för **S3 serien och Panthera X**

art.nr. 4402430 Sidoskydd S3 24" kpl par
art.nr. 4402470 Sidoskydd S3 (X) 24" kpl par
art.nr. 4402530 Sidoskydd S3 25" kpl par


art.nr. 4402570 Sidoskydd S3 (X) 25" kpl par
art.nr. 4402630 Sidoskydd S3 26" kpl par
art.nr. 4402670 Sidoskydd S3 (X) 26" kpl par

Verktyg som behövs:

3 mm insexnyckel

MONTERING PÅ S3 SERIEN [Se bilder på sid 6](#)

För S3

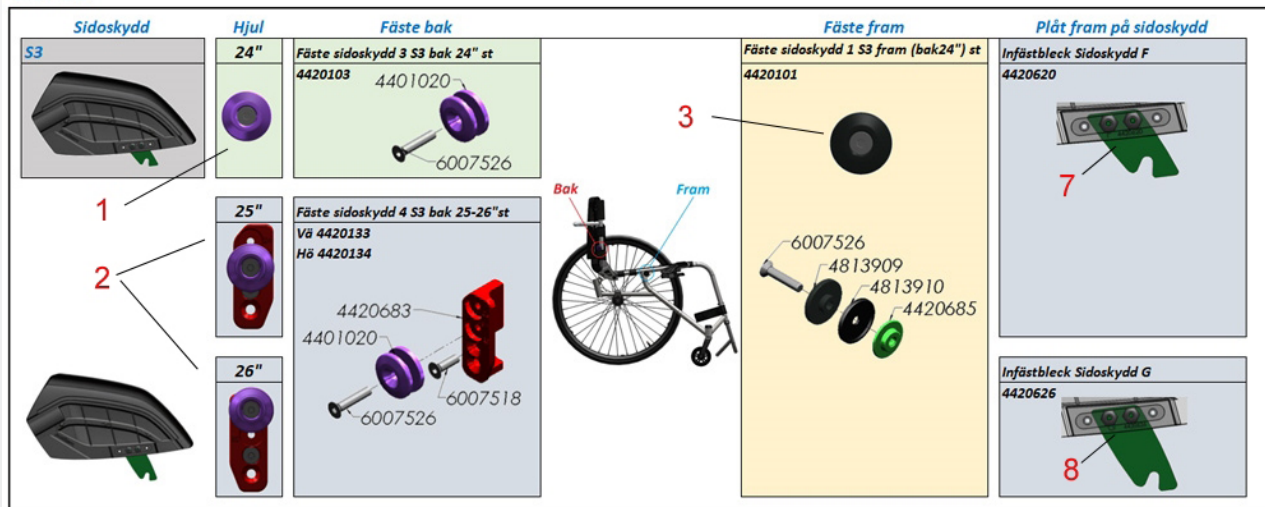


Om rullstolen är utrustad med **24" och 25" drivhjul**, använd:

Bakre fäste 4420103 (**pos 1**) x 2

Främsre fäste 4420101 (**pos 3**) x 2

Plåt fram på sidoskyddet (F) 4420620 (**pos 7**) x 2


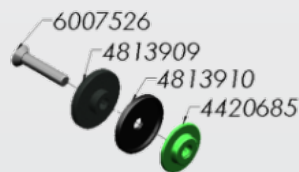


Om rullstolen är utrustad med **26" drivhjul**, använd:

Bakre fäste Vä 4420133 (**pos 2**) x 1
Bakre fäste Hö 4420134 (**pos 2**) x 1

Främsre fäste 4420101 (**pos 3**) x 2


Plåt fram på sidoskyddet (G) 4420626 (**pos 8**) x 2

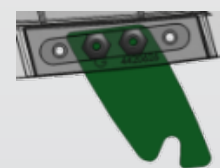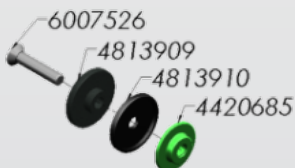


Placering av fästrulle, 4401020, i adapter, 4420683, i bakre fästet vid **25" eller 26" drivhjul**:



PLACERING AV INFÄSTBLECK VID OLIKA BALANSERINGSLÄGEN PÅ RULLSTOLEN

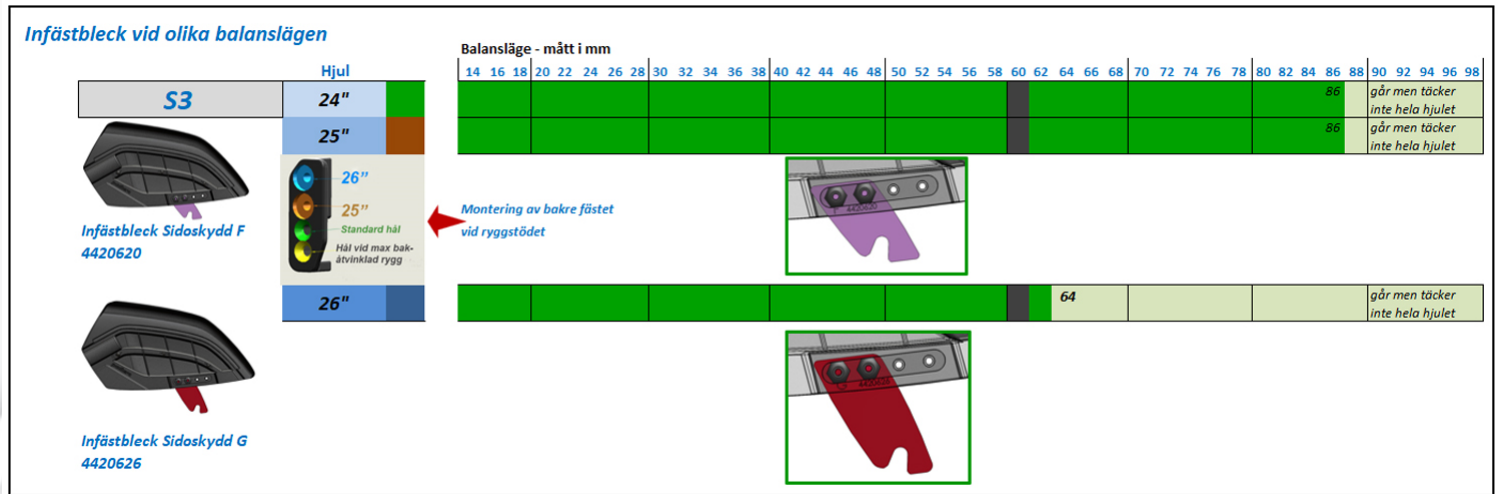


PLACING OF THE ATTACHMENT PLATE AT DIFFERENT "COG" ON THE WHEELCHAIR

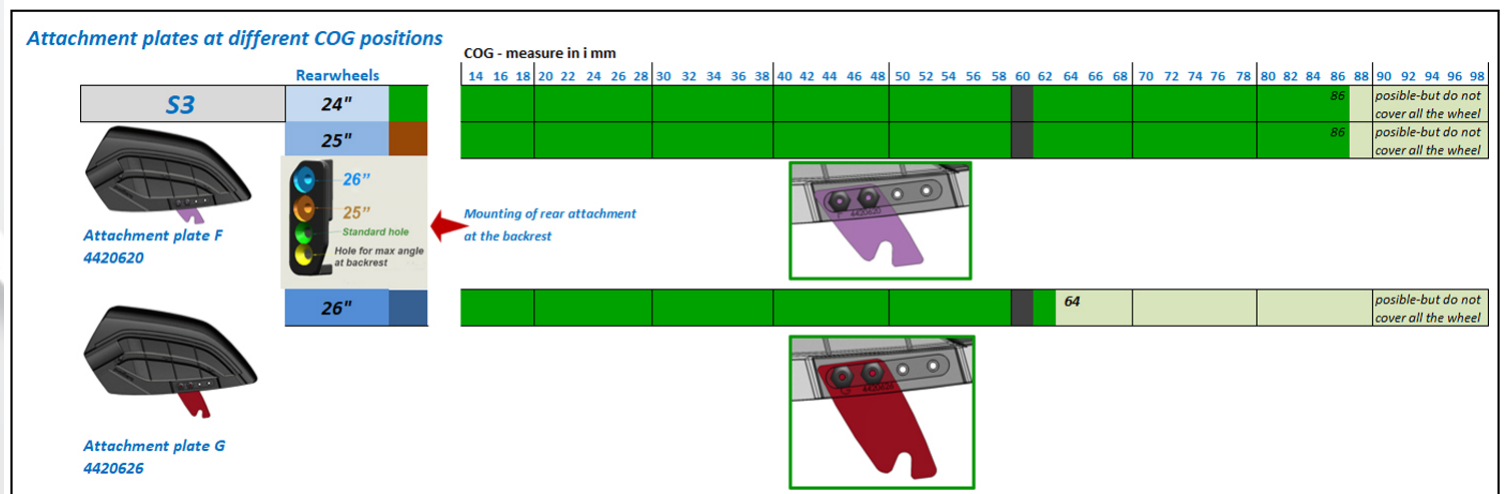

MONTERING PÅ PANTHERA X *Se bilder på sid 6*

För X

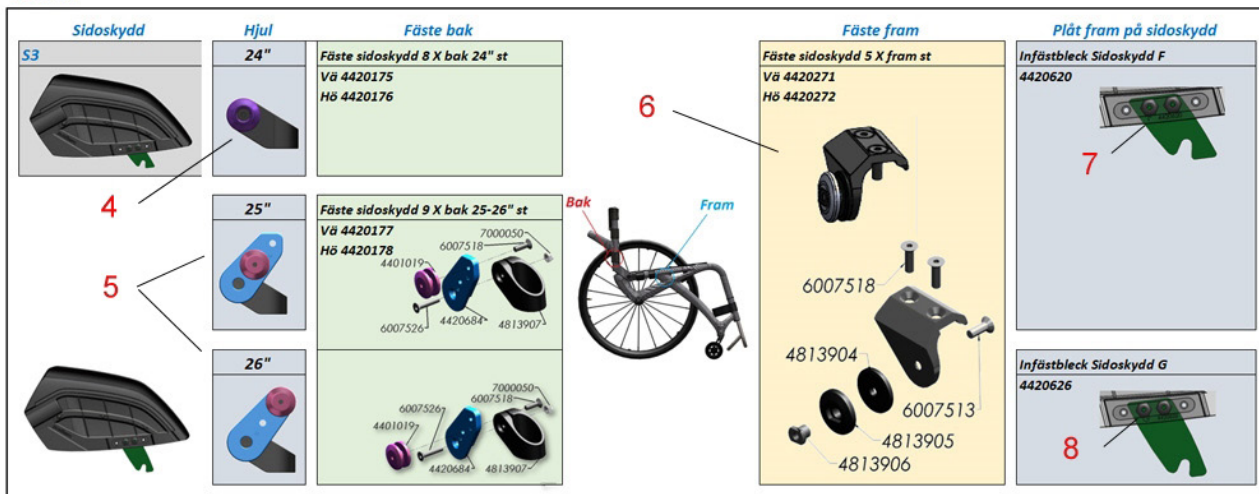


Om rullstolen är utrustad med **24"** eller **25"** drivhjul, använd:

Bakre fäste Vänster 4420175 (**pos 4**) x 1
Bakre fäste Höger 4420176 (**pos 4**) x 1

Främre fäste Vänster 4420271 (**pos 6**) x 1
Främre fäste Höger 4420272 (**pos 6**) x 1

Plåt fram på sidoskyddet (F) 4420620 (**pos 7**) x 2


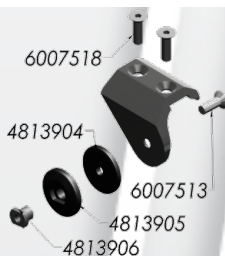


Om rullstolen är utrustad med **26"** drivhjul, använd:

Bakre fäste Vå 4420177 (**pos 5**) x 1
Bakre fäste Hö 4420178 (**pos 5**) x 1

Främre fäste Vänster 4420271 (**pos 6**) x 1
Främre fäste Höger 4420272 (**pos 6**) x 1

Plåt fram på sidoskyddet (G) 4420626 (**pos 8**) x 2

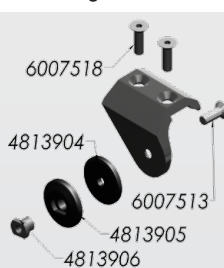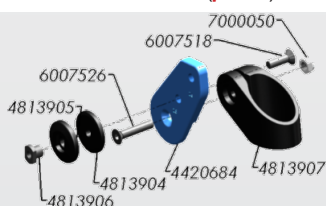

Placering av fästrulle, 4401019, i adapter, 4420684, i bakre fästet vid 25" eller 26" drivhjul:



25"



26"

SIDE GUARD S3

Assembley instruction for: Side guard S3, for the **S3 series and Panthera X**


art.no. 4402430 Sideguard S3 24" cpl pair
 art.no. 4402470 Sideguard S3 (X) 24" cpl pair
 art.no. 4402530 Sidoskydd S3 25" kpl par

art.no. 4402570 Sidoskydd S3 (X) 25" kpl par
 art.no. 4402630 Sidoskydd S3 26" kpl par
 art.no. 4402670 Sidoskydd S3 (X) 26" kpl par

Tools needed
 3 mm allen key.

MOUNTING ON THE S3 SERIES [See images on page 6](#)

For S3

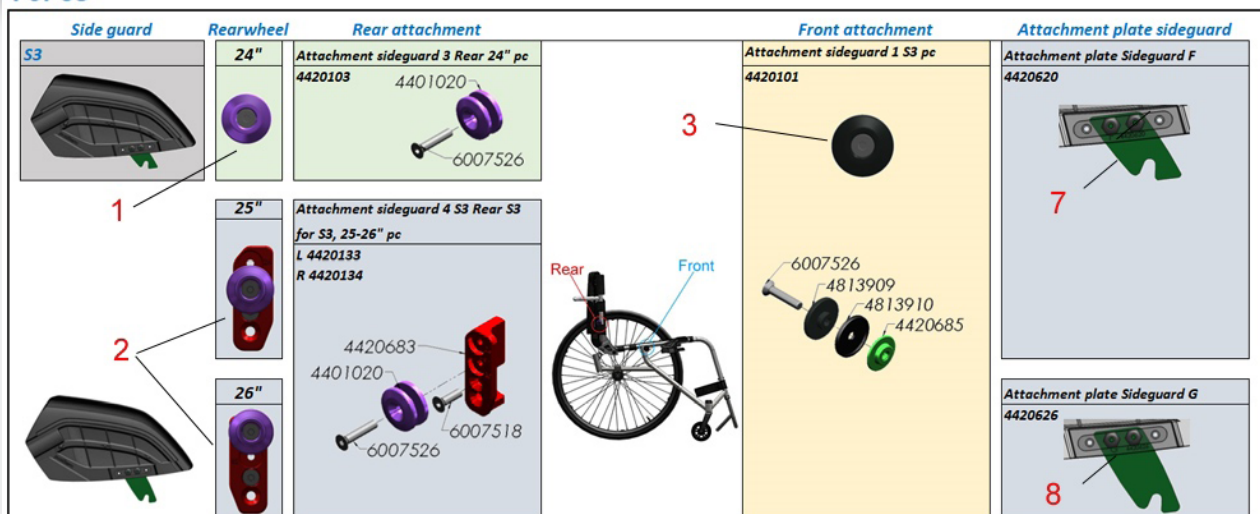


If the wheelchair is equipped with **24" or 25" rear wheels**, use:

Rear attachment 4420103 (**pos 1**) x 2

Front attachment 4420101 (**pos 3**) x 2

Attachment plate on side guard. (F) 4420620 (**pos 7**) x 2



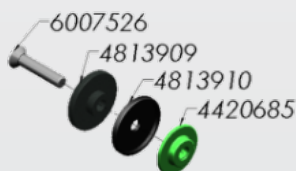


If the wheelchair is equipped with **26" rear wheels**, use:

Rear attachment L 4420133 (**pos 2**) x 1
 Rear attachment R 4420134 (**pos 2**) x 1

Front attachment 4420101 (**pos 3**) x 2

Attachment plate on side guard. (G) 4420626 (**pos 8**) x 2

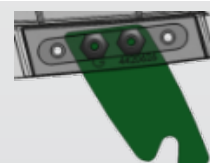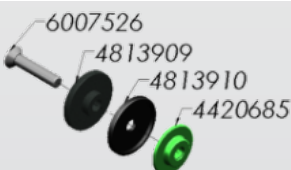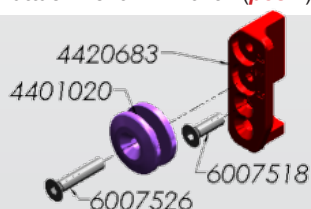


Placing of roll, 4401020, in adapter, 4420683, in the rear attachment, for 25" or 26" rear wheels:



MOUNTING ON PANTHERA X *See images on page 7*

For X

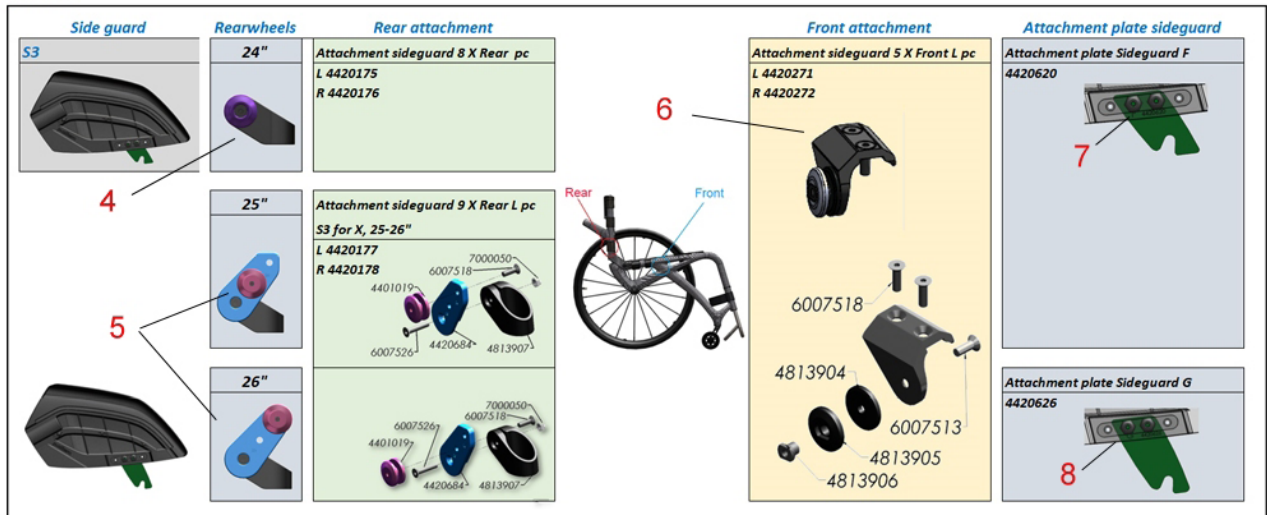


If the wheelchair is equipped with **24" or 25" rear wheels**, use:

Rear attachment L 4420175 (**pos 4**) x 1
 Rear attachment R 4420176 (**pos 4**) x 1

Front attachment L 4420271 (**pos 6**) x 1
 Front attachment R 4420272 (**pos 6**) x 1

Attachment plate on side guard (F) 4420620 (**pos 7**) x 2


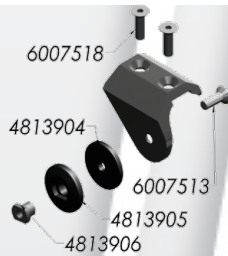


If the wheelchair is equipped with **26" rear wheels**, use:


Rear attachment L 4420177 (**pos 5**) x 1
 Rear attachment R 4420178 (**pos 5**) x 1

Front attachment L 4420271 (**pos 6**) x 1
 Front attachment R 4420272 (**pos 6**) x 1

Attachment plate on side guard (G) 4420626 (**pos 8**) x 2

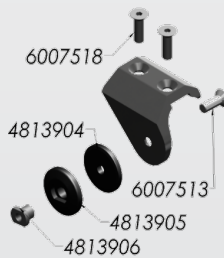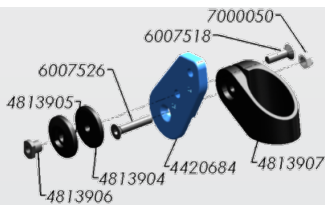

Placing of roll, 4401019, in adapter, 4420684, in the rear attachment, for **25" or 26" rear wheels**:

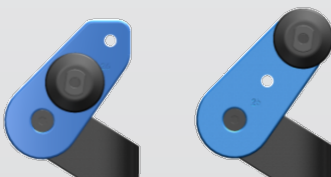

25"

26"

Sidoskydd S3 på S3 serien Side guard S3 on the S3 series



Det bakre fästet skruvas fast i det gängade hålet på ryggstödet (1)

Det främre fästet skruvas fast i det gängade hålet på främre delen av chassit. (2)

Använd insexnyckel 3 mm.

ENG

The rear attachment is mounted in the threaded hole on the backrest (1)

The front attachment is mounted in the threaded hole on the front part of the chassis (2)

Use allen key 3 mm.



Om infästblecket på sidoskyddet behöver lossas eller bytas så lossa dessa två skruvar som sitter fast med två muttrar på baksidan.
För placering av infästblecket, se [guide på sid 2](#).

Använd insexnyckel 3 mm.

ENG

If you need to loosen or replace the attachment plate on the side guard, loosen these two screws that are locked with two nuts on the backside.
For correct position of the attachment plate, see [guide at page 2](#)

Use allen key 3 mm.




Montera sidoskyddet genom att först trä över spåret på sidoskyddet på det bakre fästet en liten bit för att sen placera infästblecket på det främre fästet

ENG

Mount the side guard by first slide the slot on the side guard onto the rear attachment a little bit and then place the attachment plate on to the front attachment.

Sidoskydd S3 på Panthera X Side guard S3 on the Panthera X

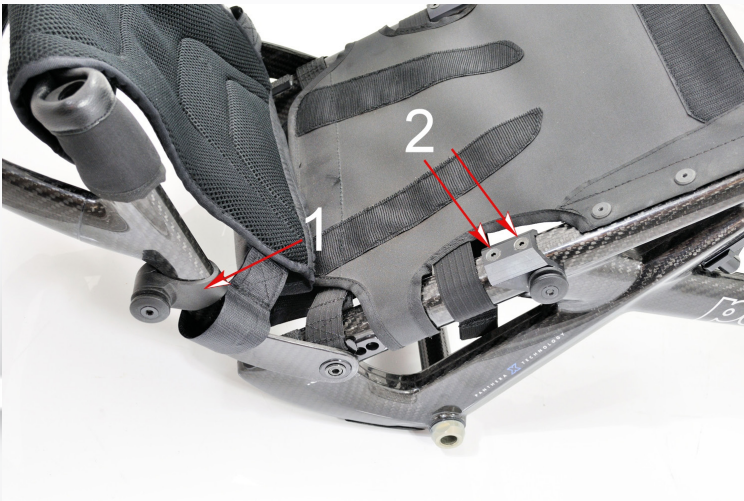

Det bakre fästet monteras runt ryggröret.(1)
Lossa skruven och kläm på fästet runt ryggröret och montera tillbaka delarna.
Det främre fästet monteras på chassiröret med två skruvar (2) i de förborrade hålen i ramröret

Använd insexnyckel 3 mm

ENG

The rear attachment is mounted around the backrest tube.
Loosen the screw and clamp the bracket around the backrest tube and reassemble the parts.
The front attachment is mounted on the chassis tube with two screws (2) in the predrilled holes.

Use allen key 3 mm.



Om infästblecket på sidoskyddet behöver lossas eller bytas så lossa dessa två skruvar som sitter fast med två muttrar på baksidan.

Använd insexnyckel 3 mm.

ENG

If you need to loosen or replace the attachment plate on the side guard, loosen these two screws that are locked with two nuts on the backside.

Use allen key 3 mm.



Montera sidoskyddet genom att först trä över spåret på sidoskyddet på det bakre fästet en liten bit för att sen placera infästblecket på det främre fästet

ENG

Mount the side guard by first slide the slot on the side guard onto the rear attachment a little bit and then place the attachment plate on to the front attachment.