

panthera®

Monteringsanvisning Panthera X broms



Den nya X bromsen är avsedd att monteras på Panthera X i de fästena som ses i **bild 1**. Fästena sitter på undersidan av ramrören framtill på chassit på båda sidor.

På bromsen finns två st T-spårsbultar, se **bild 2**, som ska passas in i fästena på ramen.

När T-spårsbultarna är monterade i fästena så justera bromsen i djupled i spåret. Se **bild 3**. Drag åt skruvarna lite lätt på båda sidor och provbromsa.

För att bromsa så för handtaget snett framåt och sedan bakåt mot däckets tills bromsen låser. Handtaget kan var placerat på antingen höger eller vänster sida. Se **bild 5**.

När bromsen är korrekt inställd ska bromsbladen skära in ca 5 mm i däcken i bromsat läge, se **bild 4**. Däcken ska vara fullpumpade, ca 8 bar.

När inställningen är klar så drag åt skruvarna lite hårdare, se **bild 3**.

Klart!

