

ARMSTÖD S3

Monteringsanvisning för:
Armstöd S3
art.nr. 4401200, 4401300

OBS! Rullstolen behöver ha bakaxel Carbon +1,5 cm monterad för att armstödet ska passa.


Verktyg som behövs:
Insexnyckel 3 mm
Insexnyckel 4 mm



1) Tag bort drivhjulen och lägg rullstolen uppochned. Ta fram ena fästet, höger eller väster.



2) Montera fästet runt chassiröret och käm ihop det.

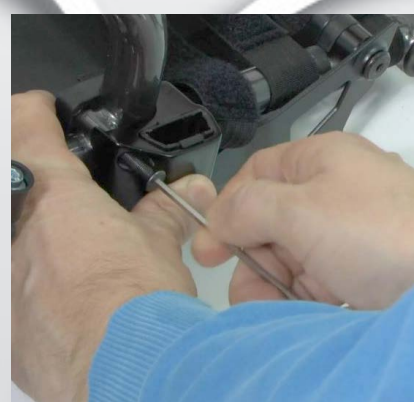


3) Montera skruv M5x30 mm genom fästet in i den fastlödda gängade bussningen i ramen. Drag åt med insexnyckel 3 mm..



4) Placera den gängade bussningen på den motsatta sidan.



5) Drag åt den med insexnyckel 4 mm ordentligt.

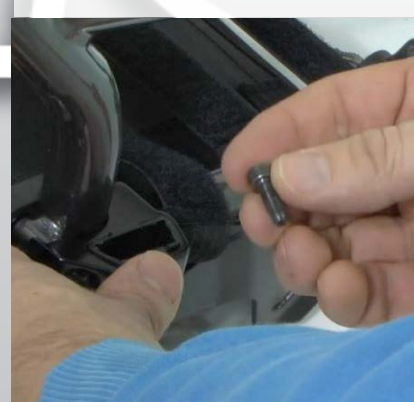

6) Tag fram skruv M5x16 mm.

panthera®



7) Montera den i det andra hålet.



8) Drag åt med insexnyckel 4 mm ordentligt.



9) Vänd på rullstolen..



10) Montera sen armstödet i fästet.
Upprepa proceduren för det andra armstödet.