

panthera®

Monteringsanvisning

Montering av drivring på vårt nya 24" standarddrivhjul

Gäller Drivhjul: Gäller Drivring:

art.nr. 1300000	art.nr. 1902411
art.nr. 1300000R	art.nr. 1902412
art.nr. 1300001	art.nr. 1902430
art.nr. 1300010	art.nr. 1903060
art.nr. 1300010R	art.nr. 1904204
art.nr. 1300011	art.nr. 1904214
art.nr. 1300020	art.nr. 1904304
art.nr. 1300020R	art.nr. 1905124
art.nr. 1300021	art.nr. 1905224
art.nr. 1300030	
art.nr. 1300030R	
art.nr. 1300031	
art.nr. 1300040	
art.nr. 1300040R	
art.nr. 1300050	
art.nr. 1300050R	




På vårt nya 24" standarddrivhjul kan man byta och montera drivring **utan** att demontera däck och slang. Drivringen har 6st fästörön (6P) och är fastskruvad med 6st M5 skruvar med Torxhuvud (storlek T25) i de förborrade och gängade hålen i fälgen. Rekommenderat åtdragningsmoment är 6 Nm. Äldre drivringar som passar det äldre standardhjulet kommer inte passa det nya då de har olika innerdiametrar på fälgen. Däremot passar drivringar till Spinergy hjulen det nya standarddrivhjulet.



Drivring i titan med fästöra. Varje drivring har 6 st. Förutom titan finns det drivringar som Max-grepp och de nya Para- och Tetra-ringarna.



Fälg med förborrade och gängade hål. 6st i varje fälg.

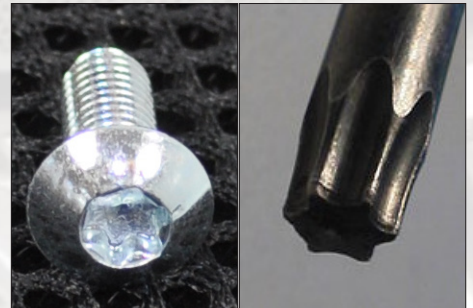


M5x12 skruv och bits med Torxhuvud. (storlek T25)



Se till att montera drivringen på rätt sida av hjulet. Drivringen ska vara på den sida där navet har en försänkning för QR-axeln.



Skruvarna dras åt med Torx verktyg (storlek T25). I detta fall ett tryckluftsdrevet verktyg med 90 graders vinkelhuvud för bättre åtkomst. OBS! 6Nm rekommenderat åtdragningsmoment.

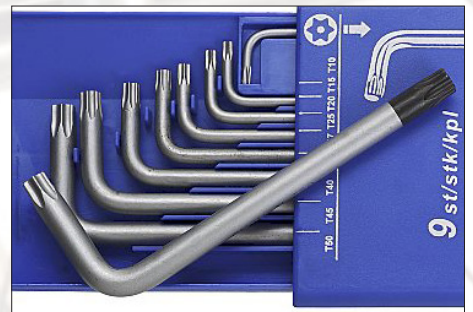

Finns inte tillgång till tryckluftsvrtyg går det naturligtvis bra att använda handverktyg (storlek T25). Drag åt skruven för hand tills den bottnar sen ytterligare ett kvarts varv med handverktyget. Viktigt är att verktyget kommer ner ordentligt i skruvskallen så att man inte drar sönder Torxen.



Färdigmonterad drivring.