

## Monteringsanvisning för hög broms ny

### Så här monterar du din höga broms på stolen:

1. När den höga bromsen levereras till dig är den ihopmonterad enligt **bild 1**.

2. För att montera denna på stolen, så lossa lite på bulten på insidan av bromsen (10) (**bild 2**), så att du kan placera bromsens klämmor (3 och 4) runt rullstolens sitsrör.

**OBS! Bulten för att justera bromsen sitter på insidan av bromsen, inte på utsidan av bromsen som på tidigare bromsar från Panthera.**

3. Prova sedan att skruva fast bulten (10), och för bromsspaken (1) framåt för att bromsa. Bromsen skall justeras så att den i låst läge sjunker in i däckets ca 4-5 mm.

-Om du tycker att bromsningen är för lös, fäll tillbaka bromsspaken och lätta på bulten (10) och flytta bromsen en liten bit bakåt. Skruva fast bulten och kolla om du är nöjd med bromsningen.

-Om du tycker att bromsningen är för hård, lätta på bulten (10) och flytta bromsen en bit framåt. Skruva fast bulten och kolla om du är nöjd med bromsningen.

4. Se till att låsytan (2) ligger an rakt mot drivhjulet för att få en så bra bromsning som möjligt.

5. Gör likadant på andra sidan.

**OBS! Om däckstrycket sjunkit och du justerat bromsen med justeringen, för att bromsen ändå ska bromsa, glöm inte att skruva ut justeringen när du pumpar däcken igen, så bromsen inte går onödigt långt in i däckets.**

### Så här monterar du ihop bromsen (se bild 2):

1. För upp justeringen (6) i låsarmen (3), och fäst sedan wiren (5) i justeringen (6).

2. Trä sedan wireskyddet (17), med den välvda tungan utåt pekande mot cylinder i andra änden på wiren, se bild 3. Tryck in wireskyddet ordentligt i hålet på låsarmen, se till att wireskyddet stannar intryckt medan du skruvar i stoppskruven (13). Se till att wireskyddets tunga följer wrens dragning.

3. Skruva sedan bulten (11) genom bussningen (7), låsarmen (2), fjädern (9) och brickan (14) in i klämma ytter (3). Använd loctite 2701 på gängan i klämma ytter (3). **OBS!** Gängan ska sprutas med loctite activator 7649 innan loctite 2701 används.

4. Montera ihop handtaget (1) med klämma ytter (3) med hjälp av bussningen (8). Använd loctite 2701 på gängan i klämma ytter (3). Sätt dekalen (18) över hålet för insexnyckeln.

**OBS!** Gängan ska sprutas med loctite activator 7649 innan loctite 2701 används.

5. Fäst sedan wiren (5) i handtaget (1) med hjälp av stoppbrickan (14) och skruven (12). Dra åt skruven tills den bottenar, men ej för hårt, då förstör man gängan i plasten.

6. Fäst klämma inner (4) i klämma ytter (3) med bricka (15) och bult (16).

7. Avsluta med att spruta 5-56 på båda bussningarna. Se också till att vajern är justerad till lagom längd genom att först skruva ut vajern så den blir så lång som möjligt och sedan vrida justeringen tre tag så wren blir lagom lång.

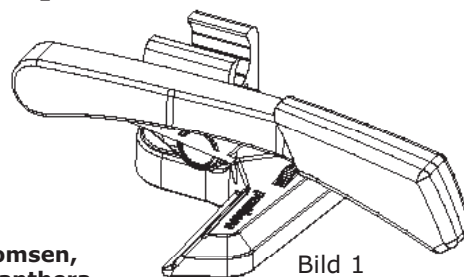


Bild 1

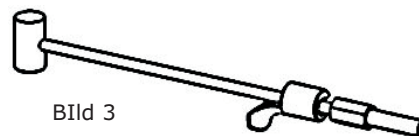


Bild 3

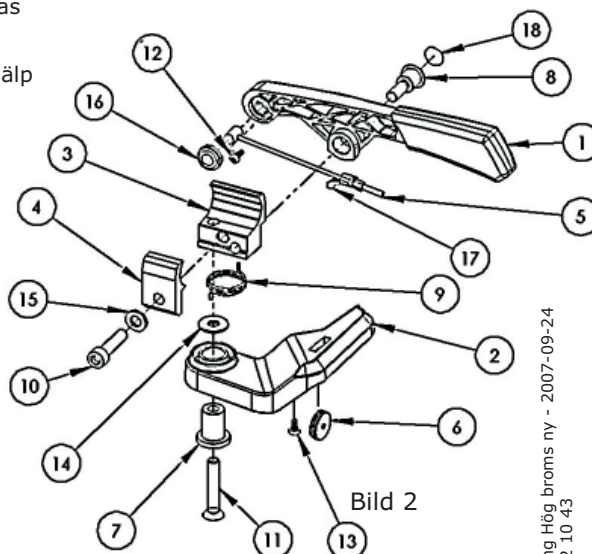


Bild 2