


# panthera®

## Monteringsanvisning



### Micro körbåge

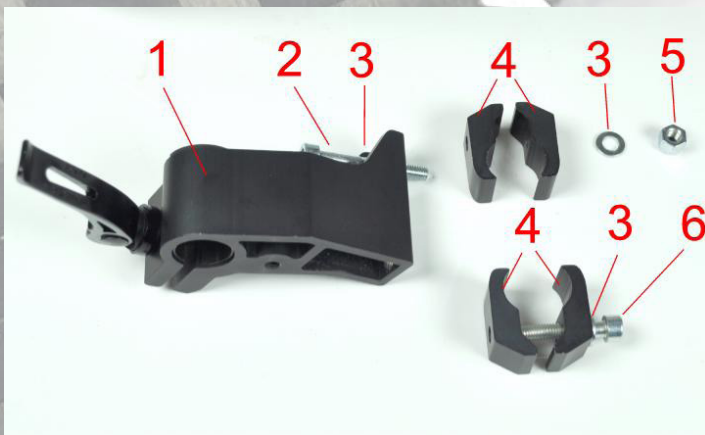

Delarna till fästet för körbågen till Micro.

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1) Körhandtagsfäste vänster | 4250054 |
| Körhandtagsfäste höger      | 4250018 |
| 2) Bult M6x 45 mm           | 6002645 |
| 3) Bricka M6x 1mm           | 8000612 |
| 4) Klämfäste std            | 4600008 |
| 5) Mutter M6                | 7000061 |
| 6) Bult M6x40mm             | 6002641 |

Montera det övre fästet ovanför ramröret (7). Använd fäste (1), bult (2), bricka (3), 2st klämfäste (4), bricka (3) och mutter (5). Använd en insexnyckel 5 mm och en fast nyckel 10 mm för att dra åt förbandet lite löst.

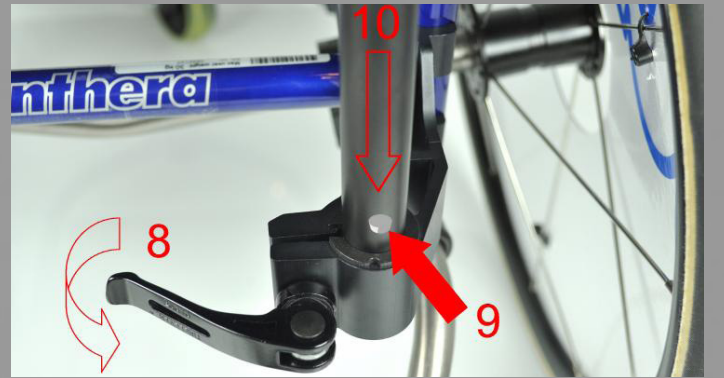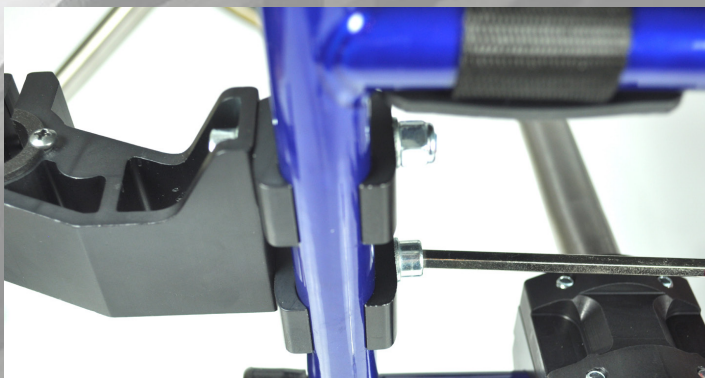

Montera det nedre fästet med 2st klämfäste (4), bricka (3) och bult (6). Skruva in bulten i det speciellt gjorda gängade hålet i körhandtagsfästet. Drag åt med insexnyckel 5mm och drag även åt det övre fästet. enl. föregående bild.

Öppna upp låsspaken (8) och håll in knoppen (9) och för in körhandtaget (10) i fästet. Justera in önskat läge och drag åt låsspaken (8).