

SIDOSKYDD S3



Monteringsanvisning för:
Sidoskydd S3

art.nr. 4401000 Sidoskydd S3/U3 24" par kpl. med fästen
art.nr. 4401010 Sidoskydd S3/U3 26" par kpl. med fästen

Verktyg som behövs:

3 mm insexnyckel



Länk till
monteringsvideo



1) Ta fram fästet till sidoskyddet.



2) Börja med det främre fästet, som ska monteras i det främre gängade hålet i ramen på höger sida..



3) Drag åt skruven med insexnyckel 3 mm.



4) Fortsätt montera det bakre fästet i det gängade hålet i ryggstativet på höger sida. Drag åt med insexnyckel 3 mm.



5) Tag fram det högra sidoskyddet och trä spåret i detta på det bakre fästet.



6) För sedan ner sidoskyddet så att det fastskruvade bläcket glider ner i det främre fästet.

Upprepa samma procedur för det vänstra sidoskyddet.