


Sprängskiss Panthera

Vinkelställbar Fotplatta Carbon

permobil

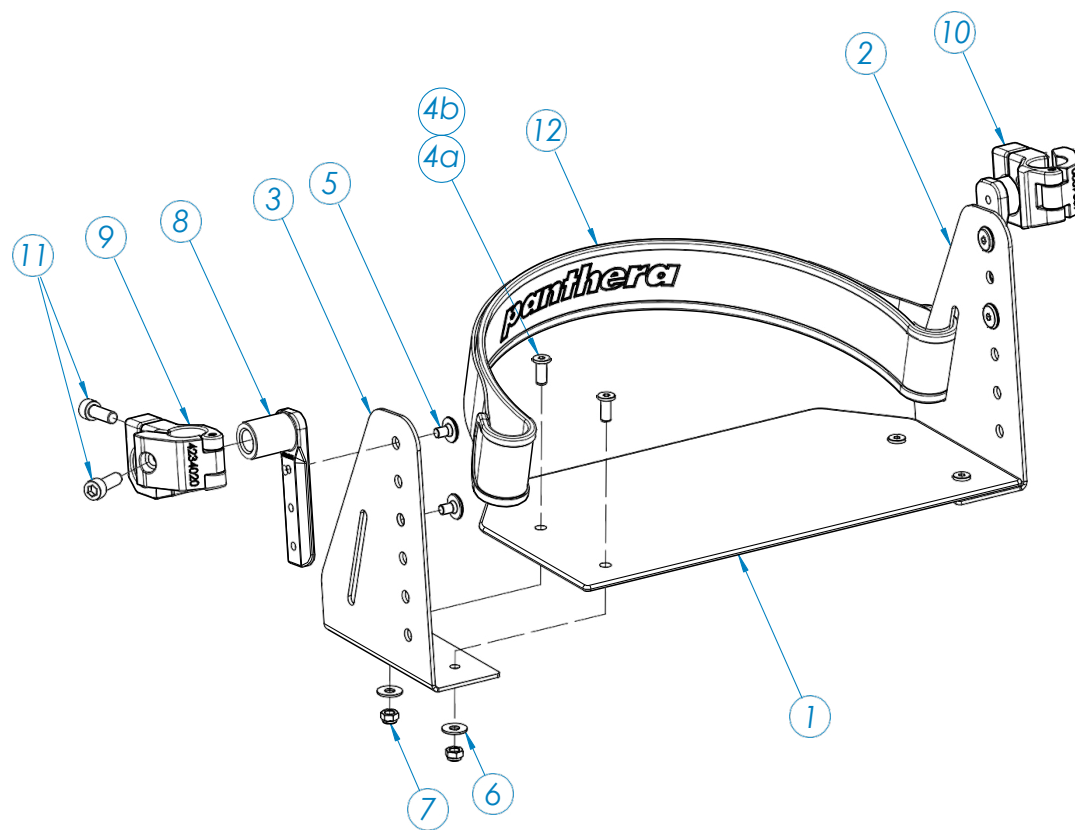

Pos.	Benämning		Art.nr	Antal
1	Platta carbon	Ej separat beställningsbar		1
2	Fästsida Fotplatta carbon vä	Ej separat beställningsbar	6506011	1
3	Fästsida Fotplatta carbon hö	Ej separat beställningsbar	6506012	1
4a	Bult MELC6S M5x12 FZ Svart	Ej separat beställningsbar	6004512C	4
4b	Bult MELC6S M5x16 FZB Svart	Ej separat beställningsbar	6004516C	4
5	Bult MELC6S M5x8 FZSV	Ej separat beställningsbar	6004588	4
6	Nitbricka M5x13x1 fzb	Ej separat beställningsbar	8000513	4
7	Mutter DIN 985 M5 låg nylock fzb		7000050	4
8	Fäste vinkelställbar fotplatta		6506050	2
9	Klämma B3 Sida kpl hö		4234042	1
10	Klämma B3 Sida kpl vä		4234041	1
11	Bult MC6S M6x18 12.9 FZSV		6002648	4
12	Vadband Panthera			1