



KRYCKKÄPPSHÅLLARE S3

Bruksanvisning för:
Kryckkäppshållare S3
art.nr. 9900301



Länk till video

SÄTTA KRYCKAN PÅ RULLSTOLEN



1) Lyft upp det övre fästet



2) Tryck fast fästet på ryggbågen.



3) För kryckans nedre fäste mot chassit så att magneten fäster mot metallröret.

TA BORT KRYCKAN FRÅN RULLSTOLEN



1) Tryck på kryckans handtag framåt så att det nedre magnetfästet släpper från chassit.



2) Tryck kryckans handtag åt sidan så att fästet vrids loss från ryggbågen.



3) Lyft bort kryckan från rullstolen.