


Enhandsdrift

Handhavandemanual för enhandsdrift med quickrelease.


Enhandsdrift är ett tillbehör för de personer som har nedsatt eller saknar funktion i ena armen. Den gör att man kan framföra sin rullstol med bara en arm, då båda drivringarna är monterade på ena sidan. Den mindre drivringen driver det motsatta hjulet och den större det närmaste. Genom att greppa om båda drivringarna med en hand och föra dem framåt så åker stolen rakt fram.

1. Montering av enhandsdrift med quickrelease.

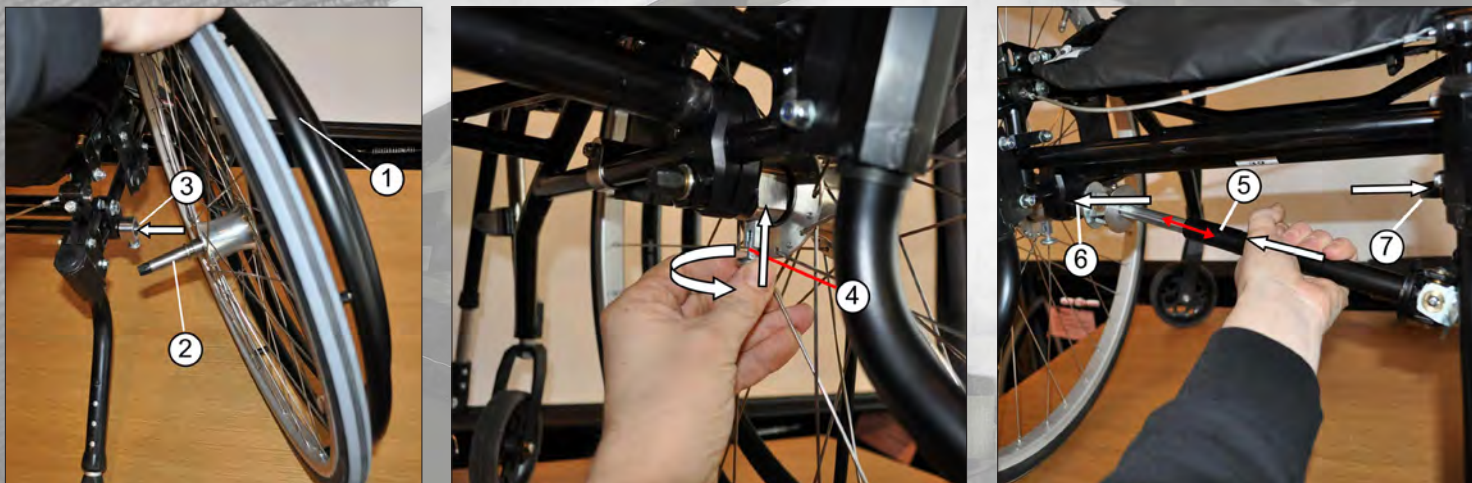

- 1) Montera drivhjulet med drivringarna (1) på den sida som är aktuell för brukaren.
- 2) För in drivhjulssaxeln (2) i hjulinfästningen (3) tills det tar stopp.
- 3) Drag ner låssprinten (4) och kontrollera att drivhjulssaxeln (2) är helt intryckt.
- 4) Vrid på låssprinten (4) och släpp upp den så att den låser i låsspåret på drivhjulssaxeln (2).
- 5) Kontrollera att drivhjulet (1) sitter fast ordentligt genom att dra i det rakt ut.
- 6) Upprepa proceduren med det andra hjulet.
- 7) Passa in drivaxelns (5) ena ände på ena drivhjulet
- 8) Pressa ihop den fjädrande drivaxeln (5) så att den andra änden kan passas in på det andra hjulet (7).
- 9) Prova sen att axeln är riktigt monterat genom att dra i den mindre drivringen (1) och se att den driver på hjulet.

2. Demontering av enhandsdrift med quickrelease.

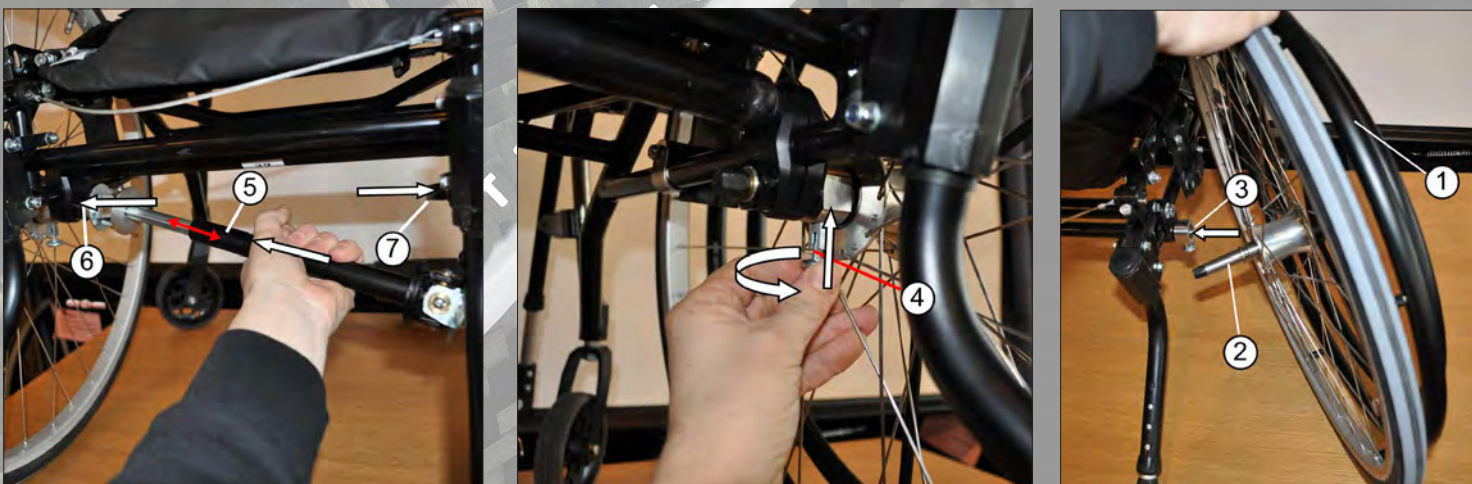

- Lösa drivaxeln (5) genom att pressa ihop den.
Lösa låssprintarna (4) genom att dra nedåt och sen vrida den ett kvarts varv för att frigöra drivhjulssaxeln.
Drag ut hjulen (1) ur hjulinfästningarna. (3)
OBS! Detta får ej göras med brukaren sittandes i stolen!