

## Vajerbyte Hög broms ny

### Instruktion för att byta vajer på hög broms ny.

1. Lossa skruvarna (12) och (13), ta bort stoppbricka (16), lossa vajer från bromshandtaget (1), lossa vajer från låsarmen (2) genom att skruva ut justerringen (6).

2. För upp justerringen (6) i låsarmen (2), och fäst sedan vajer (5) i justerringen (6). OBS vajer ska monteras i samma läge som på bilden, se bild 2, nedan dvs den lilla cylindern i en änden på vajer ska vara parallell med låsarmen(2).

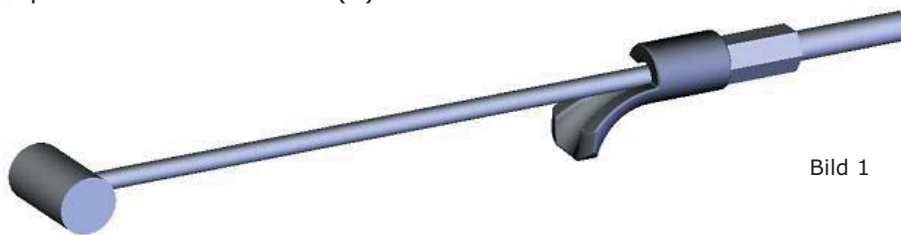


Bild 1

3. Trä sedan vajer skyddet (17), med den välvda tungan utåt pekande mot cylinder i andra änden på vajer, se bild 1. Se till att vajer skyddets tunga följer vajer draging i obromsat läge. Tryck in vajer skyddet ordentligt i hålet på låsarmen(2), se till att vajer skyddet stannar intryckt medan du skruvar i stoppskruven (13).

4. Fäst sedan vajer (5) i handtaget (1) med hjälp av stoppbrickan (16) och skruven (12). Dra åt skruven till den botten, men ej för hårt, då förstör man gängan i plasten.

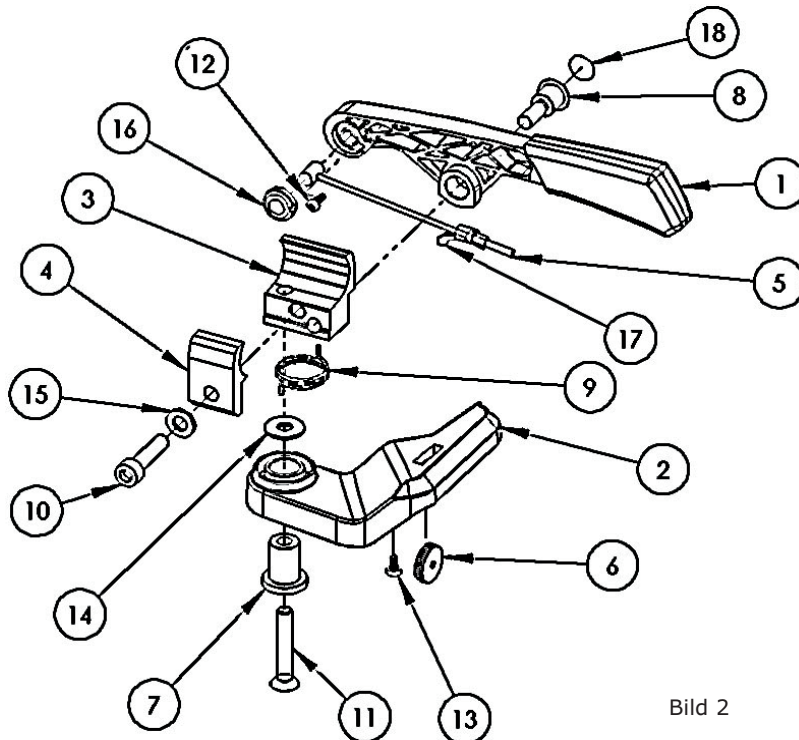


Bild 2