

KÖRHANDTAGSFÄSTE BAMBINO

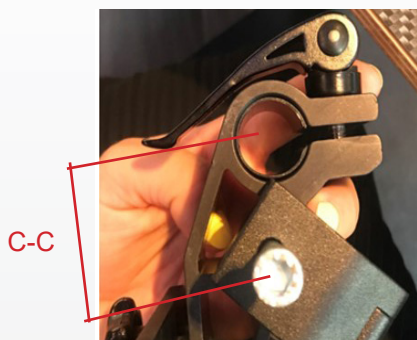


BILD 1



BILD 2



BILD 3

Produktinformation körhandtagsfäste Bambino

Vi har fått en avvikande leverans av körhandtagsfäste till Bambino art.nr. 4250021/22.

Avvikelsen orsakas av att C- C måttet mellan hålen på körhandtagsfästet (bild 1) är för litet. Detta resulterar i att ena hörnet på gångjärnsklämman täcker en del av hålet där körhandtaget monteras (bild 2).

För att säkerställa leveranser av rullstolsorder har vi en temporär men tekniskt fullgod lösning med avfasad klämman (bild 3) under en kort period i väntan på ny leverans.

Den avfasade gångjärnsklämman är kompatibel till alla monteringar.

Vid rekond/ service kan monteringsproblem uppstå om den fasade gångjärnsklämman och denna version av körhandtagsfäste inte hålls ihop i samma kit. Önskas utbyte av körhandtagsfästet var vänlig kontakta oss.

Tillbehörsorder restnoteras och levereras när de korrekta körhandtagsfästena är på plats.