

Sitsväska U2-light

Avsett ändamål

Tanken är att sitsväskan skall sitta fast i dynan. När man lyfter ur dynan får man automatiskt med sig väskan med alla tunga telefoner, plånböcker m.m. När man lägger tillbaka dynan i stolen så hamnar väskan på rätt plats, och fastnar i bakkant med hjälp av magneter mot ramen.



Så här används sitsväskan.



Väskan sitter fast med karborre under dynan. När du lyfter i och ur dynan så följer väskan med.



Väskan hänger ned framför sitsen. För väskan bakåt, och magneterna i väskan fäster mot ramen.



När du kör sitter väskan fast i position.

Så här fästes väskan på dynan.

På dynans undersida fästes kardborreband. Man kan använda det självhäftande bandet som följer med. Bäst resultat får man om man dessutom syr fast bandet. Kardborrebandets position måste provas fram, så att väskan hänger ner lagom långt, och så att änden och de insydda magneterna hamnar mot stolens rämrör.



Fäst bandet långt fram.



...eller längre bak.



Fäst sedan väskan mot kardborren.