

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

Tippskyddsfästen vid olika höjningar

Om man höjer en rullstol, så medför det att även tippskyddets position höjs.

För att bibehålla tippskyddets läge i förhållande till marken vid höjning, så kan man använda olika långa tippskyddsfästen.

Här nedan kommer en kort beskrivning om vilket tippskyddsfäste man ska använda vid olika höjningar av rullstolen.

Stolar med 24" drivhjul:

När stolen höjs 1-29mm, skall "Tippskyddsfäste, std" användas (art.nr 435 11 01).

När stolen höjs 30-59mm, skall "Tippskyddsfäste, +30mm" användas (art.nr 435 11 06).

När stolen höjs 60-90mm, skall "Tippskyddsfäste, +60mm" användas (art.nr 435 11 07).


Stolar med 26" drivhjul:

När stolen höjs 1-14mm, skall "Tippskyddsfäste, std" användas (art.nr 435 11 01).


När stolen höjs 15-44mm, skall "Tippskyddsfäste, +30mm" användas (art.nr 435 11 06).

När stolen höjs 45-75mm, skall "Tippskyddsfäste, +60mm" användas (art.nr 435 11 07).

Tippskyddsfäste, std

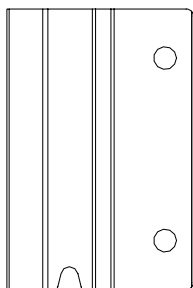

Tippskyddsfäste, +30mm

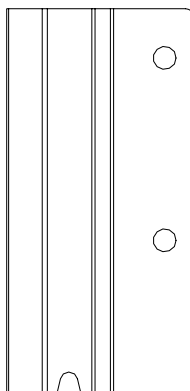

Tippskyddsfäste, +60mm

