


INSTALLATION / ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Generell information

Utöver att välja rätt drivringsmodell, se till att den är i rätt storlek och har rätt typ av infästning (öron/bleck eller gängad nit). Använd hjulet som guide för att bestämma rätt storlek på drivringen. Du hittar en illustration av hur du mäter hjulet på baksidan av CarboLifes produktkatalog.

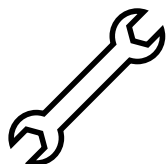

Montering

Innan du installerar CarboLifes drivringar med öron bör hjulets ekerspänning kontrolleras och vid behov korrigeras. Om ekerspänningen är för låg kan öronen på drivringen gå sönder.

När CarboLifes drivringar med gängade nitar monteras ska man försiktigt skruva i motstående skruvar lätt och jämnt. Skruvarna kan sedan dras åt efter varandra. Det här undviker skador på nitarna.



Rengöring och skötsel

Drivringar med Tetra Grip-beläggning ska rengöras noggrant minst en gång i veckan med en ren och fuktig trasa. Smuts (t.ex. från oljor i handkrämer) kan enkelt avlägsnas med fettlösande rengöringsmedel. För kraftigare smuts rekommenderar vi att använda handsprit eller andra desinfektionsmedel.

Silikonremsan på Gekko-drivringar kan initialt dra till sig damm. Vi rekommenderar att rengöra Gekko-drivringen flera gånger i veckan under de första 3 – 4 veckorna. Det översta lagret av materialet förändras över tid på grund av det dagliga användandet, vilket resulterar i att silikonremsan blir mer antistatisk och greppvänlig.



Första hjälpen för repor etc.

Mindre repor på den svartanodiserade eller pulverlackerade ytan på drivringen kan döljas genom att dutta flera gånger med en vattenfast märkpenna (t.ex. Sharpie eller Edding).

Mindre revor eller släpp på Tetra Grip-beläggningen från drivringens underliggande struktur kan limmas med ett kommersiellt tillgängligt universallim.