

SITTBREDDSDAPTER BAMBINO 3

Monteringsanvisning för:
Sittbreddsadapter Bambino 3
art.nr. 4235021, 4235022

Verktyg som behövs:
Inga

OBS! Sittbreddsadapter kan bara monteras på ett sidoskydd **utan** förmonterad förhöjningdel B3 (4235012 / 4235013). Eventuell förhöjningdel B3 måste demonteras innan montering av Sittbreddsadaptern och monteras efter att Sittbreddsadaptern har blivit monterad.



1) Trä ner aluprofilen (2) på sidoskyddet i hålet i botten på sittbreddsadaptern (1).



2) För upp adaptern längs profilen, tills den ligger över sidoskyddet. Pressa på övre och bakkanten av adaptern tills den snäpper fast över kanterna på sidoskyddet.