

### BENSTÖD S3 SWING

Felsökning för:  
Benstöd S3 Swing  
art.nr. 43911XX, 43912XX, 43913XX

Verktyg som behövs:  
Insexnyckel 3 mm  
Insexnyckel 6 mm  
Kniv



LÄNK TILL  
INSTRUKTIONSVIDEO



1) Om benstödet inte går att lossa från rullstolen, fast man trycker ordentligt på frigöringsknappen, kan denna instruktion avhjälpa problemet.



2) Lossa denna skruv med insexnyckel 3 mm och ta ut den.




3) Använd sen insexnyckeln för att pressa ut låskolven så att benstödet lossnar från rullstolen.



4) Avlägsna benstödet från rullstolen.



5) Montera tillbaka skruven i benstödet.

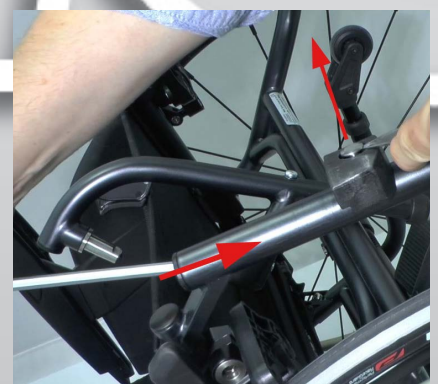

6) Använd ett lämpligt verktyg, t.ex. en lång insexnyckel och tryck ned frigöringsmekanismen i ramröret och pilla sen loss utstötaren med t.ex. en kniv.

# panthera®



7) Tag bort utstötaren



8) Drag sen åt fästet mot ramen ordentligt med insexnyckel 6 mm.



9) Montera tillbaka utstötaren.



10) Montera slutligen tillbaka benstödet på rullstolen och testa låsfunktionen som nu bör fungera.



LÄNK TILL  
INSTRUKTIONSVIDEO