

Monteringsanvisning för förhöjningsatts 26"

Så här gör du för att montera förhöjningsatts 26":

1. Börja med att plocka isär framgaffeln enligt bild 1. Tag bort ändproppen (2), och lossa muttern (6). Plocka bort brickan (5), och slå ut gaffeln (1). Var försiktig så att du inte skadar de lager (3 och 4) som sitter i chassit.

2. Slå försiktigt ut lager (3 och 4).

3. Tag gaffeln (1) och skruva loss gaffeltappen enligt bild 2.

4. Byt ut din nuvarande gaffeltapp mot den längre gaffeltappen i förhöjningsattsen. Skruva ihop. Se position 1 i bild 3.

5. Du skall nu montera på framgaffeln med den nya gaffeltappen på stolen. Börja med att smörja in lagerhylsan (7) i bild 3 med någon låsningsolja (t.ex Loctite). Se bild 3.

6. Tryck i lager (3) i lagerhylsan (7), och tryck upp lagerhylsan i chassit enligt bild 3.

7. Smörj även lite låsningsolja runt lager (4) innan du trycker ner det i chassit.

8. Tryck nu upp framgaffeln genom lagerhylsan, lägg brickan på det översta lagret och dra åt muttern ordentligt.

9. Tryck på ändproppen. Du kan se hur det skall se ut i bild 4.

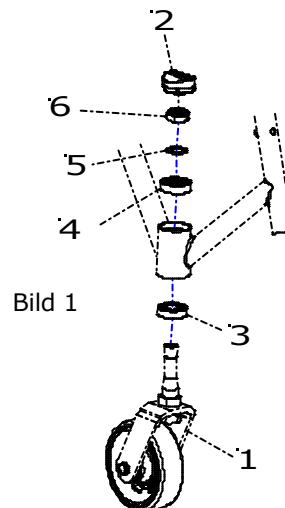


Bild 1


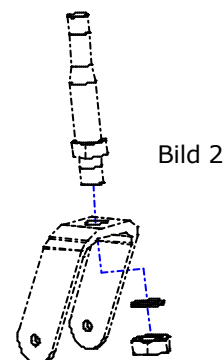


Bild 2



Smörj med
låsningsolja

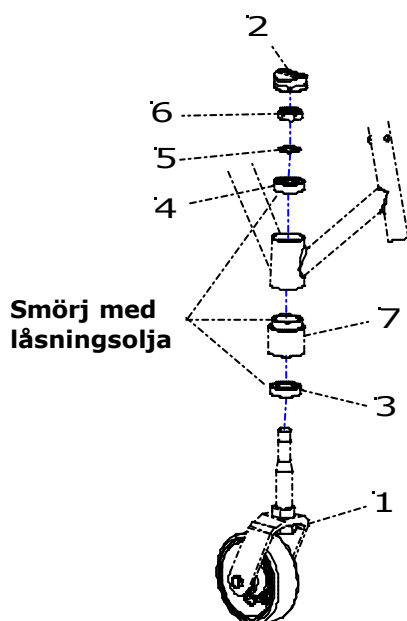