

BRICKBORD OCH MAGNETFÄSTE BAMBINO 3



Brickbord



Magnetfäste på drivhjul

Monteringsanvisning för:
Brickbord och magnetfäste Bambino 3

art.nr. 6810000 Brickbord
art.nr. 6810008 Magnetfäste


Max. belastning 5kg

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 3 mm, Plattång
Avbitare / sax


Placering av fästena i brickbordet för olika sittbredder på rullstolen. Bokstäver "A" och "B" finns instansade i fästena. Bordet sett underifrån.




1) Bredd 24 cm. Monteras i de inre hålen på bordet.

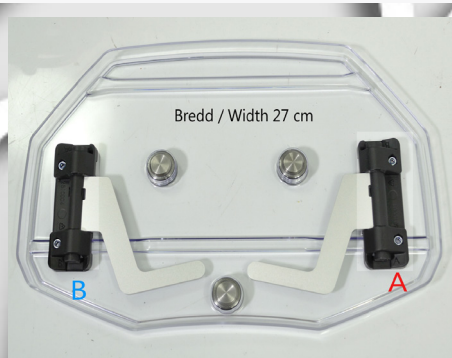


2) Bredd 27 cm. Monteras i de yttre hålen på bordet.

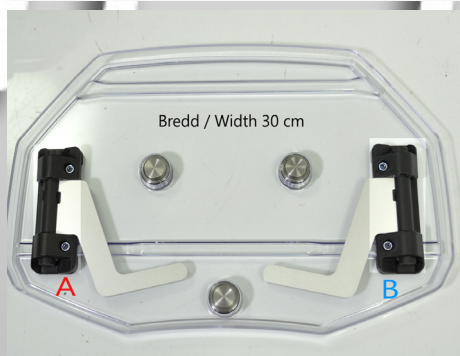

3) Bredd 30 cm. Monteras i de inre hålen på bordet. Notera att fästena har bytt plats mellan vänster och höger jämfört med fig 1 och 2.

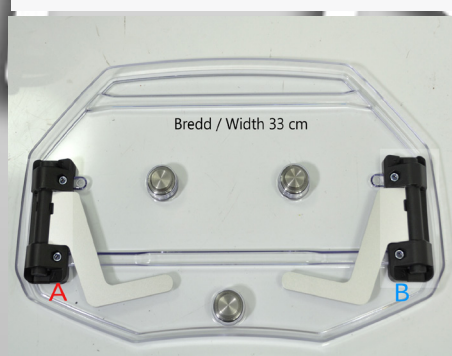

4) Bredd 33 cm. Monteras i de yttre hålen på bordet. Notera att fästena har bytt plats mellan vänster och höger jämfört med fig 1 och 2.

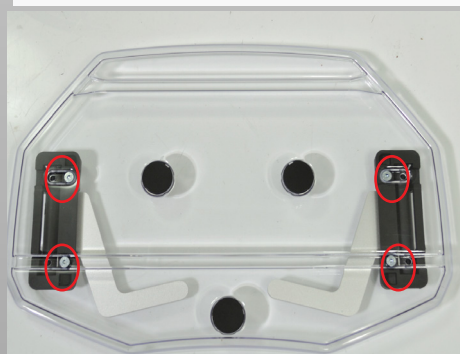

5) Vänd på bordet och skruva in skruvarna. Se till att de bottenar i spåret.



6) Placera bordsfästena i hålen i sidoskydden som bilden visar och tryck ner dem tills de bottenar.

Montering av magnetfäste



7) Lägg magnetfästet centrerat på utsidan av drivhjulet. Rotera det så att varje hålpar ligger över två ekrar.

Om hjulen har ekerskydd, måste dessa först borras upp med 6 hål 5mm, centrerat magnetfästet på ekerskyddet och använd det som mall.



8) Trä igenom buntbanden bakifrån så öljetten hamnar på fästets baksida. Dra åt så fästet sitter utan att glappa. Kapa ändarna på buntbanden. Har hjulet ekerskydd dras buntbanden genom både ekerskydd och magnetfäste



9) Fäst brickbordet på hjulet genom att positionera magneterna mot varandra.