

Monteringsanvisning

Freewheel - vända låshandtag




Låshandtaget på Freewheel kan i vissa läget behöva vändas då det tar i, vid anpassade fotstöd, till t.ex. Panthera X.




Exempel på anpassat fotstöd där man behöver vända handtaget på Freewheel, 180°.



Börja med att lossa denna skruv med en insex 4 mm. Bara lossa, inte skruva bort.

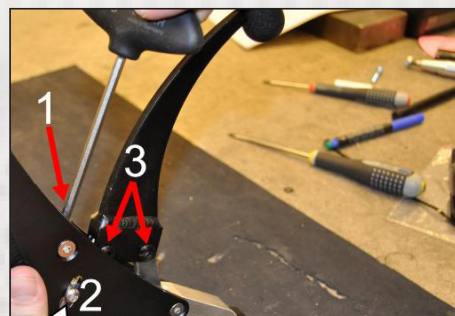

Lossa på skruven (1) med insex 5 mm, så att skruv (2) glider i sitt spår för att på så sätt frigöra skruvarna (3).

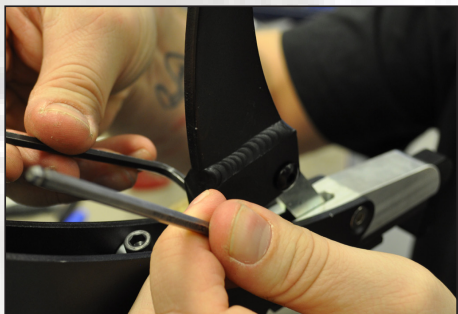


Tag bort skruvarna (3) helt med två stycken 4 mm insexnycklar.



Lägg i en klick gängglåsning på de lossade skruvarna (3).



Gör en fas med en fil på de kanter som saknar en fas, så lik som möjligt som den som redan finns.

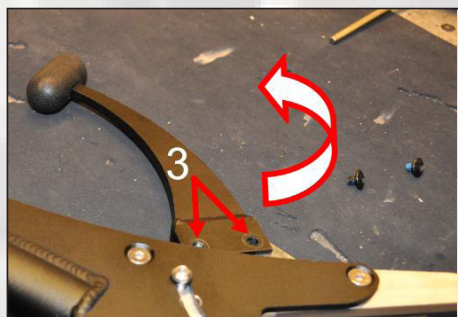

Vänd på handtaget 180° och montera tillbaka skruvarna (3) med gängglåsning på.



Fortsätt sen med den ordinarie monteringsanvisningen för Freewheel för att passa in den på fotbågen.