

DÄCKSKINS reTyre TRACTION



Däckskins Traction
Art nr 1100300

Verktyg som behövs:
Inga verktyg




Monteringsfilm

Steg 1




Centrera clickfästet runt en eker och klicka på det på fälgen.

Steg 2

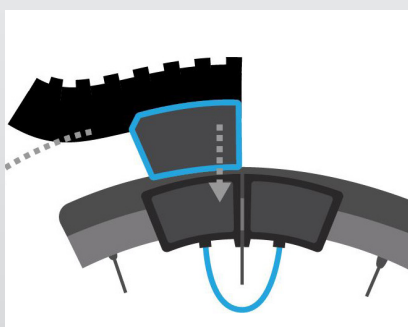

Fäst ena änden på clickfästets ena halva och rulla på reTyre Traction. Se till att reTyre Traction sluter om däckets. Det har ingen betydelse om man fäster fram eller bakkant först och rullar på, man väljer det som känns enklast. Har man sidoskydd med skärm på stolen kan det vara enklare att lägga på reTyre Traction framifrån och rulla bakåt.

Steg 3

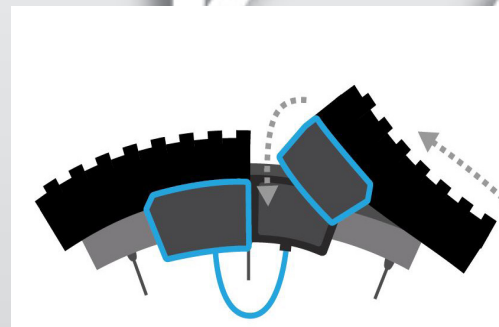

När du kört varvet runt, dra i änden och fäst karborreändarna på den andra halvan av clickfästet. Nu är reTyre Traction monterat och det bör vara en glipa på 0-20mm i skarven.

Notera !

För att passa variationer i däckstorlek, har reTyre Traction designats för komfortabel körning med en glipa upp till 20mm.

