

Monteringsanvisning för bakaxel

Så här gör du för att montera bakaxeln:

1. Lägg chassit "på rygg", med ramens undersida uppåt.
2. Ta bakaxeln (1) och trä på shimset (4), på den sida där bakaxelns bult är längst. (Skickar med shims med olika tjocklek, man får pröva sig fram till den storlek som passar bäst. Var snäll och skicka tillbaka överblivna shims.) Trä sedan på "hjulfäste inner" (2) på båda sidor.
3. För sedan ner bakaxeln diagonalt mellan ramens längsgående rör. Vrid sedan bakaxeln på plats, så att den sitter tvärs ramen.

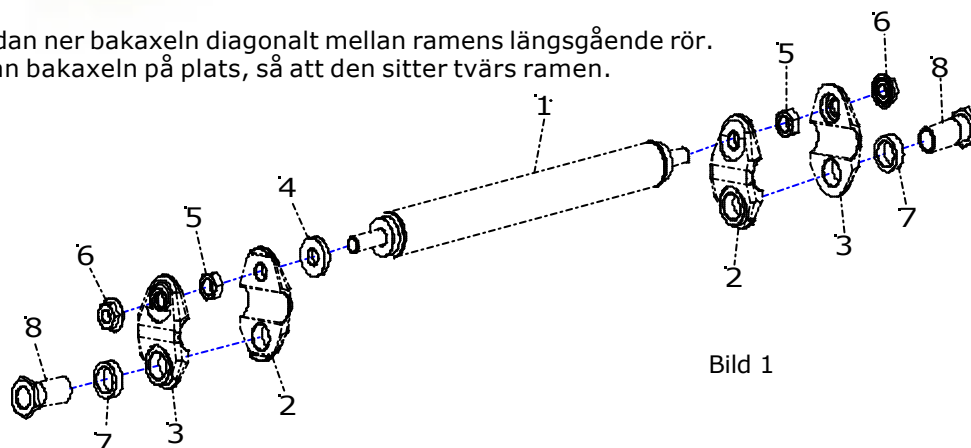


Bild 1

4. Skruva på de "inre muttrarna" (5), och dra åt dessa hårt.
5. Montera sedan på de "yttre hjulfästena" (3), och skruva på "mutterstycken" (8) med distanser (7) och muttrar (6).
6. Skjut axeln framåt eller bakåt för korrekt balans.
7. Kolla att "hjulfästena" är lika långt fram på båda sidorna. Detta kollar du enklast genom att mäta med linjal eller måttband, att avståndet mellan det längsgående ramrörets bakkant, och "hjulfästets" bakkant, är lika på båda sidor.
8. När du sedan drar fast "hjulfästerna" skall du alltid först dra åt "mutterstyckerna" på båda sidor. Sedan drar du M10- muttrarna på båda sidorna.

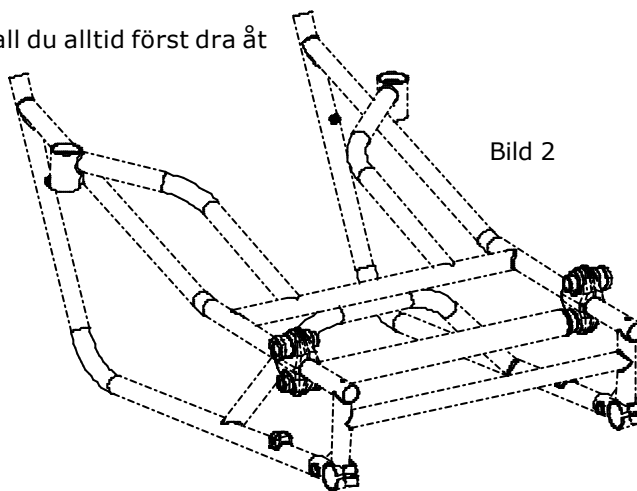


Bild 2