

BÅLSTÖD S3

Monteringsanvisning för:
Bålstöd S3

art.nr. 6770200 Bålstöd S3 kpl par med mont.sats
art.nr. 6770207 Monteringssats styck bålstöd S3 Hö
art.nr. 6770208 Monteringssats styck bålstöd S3 Vä



QR länk till
monterings video

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm



1) Lossa på rygglädseln för att komma åt och montera bålstödet lättare.




2) Demontera bålstödet för att kunna montera det på ryggstödet.



3) Fäll klämman runt ryggröret och montera den försänkta skruven



4) Passa sen in skruven på det ena gängade hålet på bålstödsfästet.

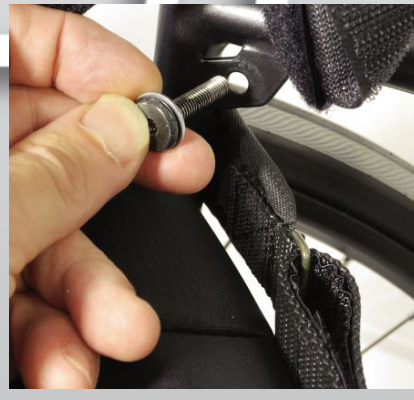

5) Montera den andra skruven med bricka i hålet på det fastlödda örat i ryggbågen.



6) Montera sen bussningen på skruven.



7) Fäst sen skruven i det andra hålet på bålstödsfästet.



8) Drag åt skruvarna ordentligt med insexnyckel 4 mm.



9) Montera bålstödet i fästet..



10) Justera in bålstödet till önskad höjd och drag sen åt skruvarna. Upprepa proceduren på andra sidan om ett vänster bålstöd också ska monteras. Avsluta med att montera tillbaka rygglädseln.