

### BÅLSTÖD S3 VER. 2

Monteringsanvisning för:  
Bålstöd S3 ver. 2

art.nr. 6770300 Bålstöd S3 kpl par med m.sats VER2

art.nr. 6770307 Mont.sats styck bålstöd S3 Hö VER2

art.nr. 6770308 Mont.sats styck bålstöd S3 Vä VER2

Verktyg som behövs:  
Insexnyckel 4 mm



QR länk till  
monterings video



1) Lossa på rygglädseln för att komma åt och montera bålstödet lättare.



2) Ta isär bålstödet för att lättare kunna montera det på ryggstödet.



3) För in skruv M6 genom hålet i förstärkningsplåten på ryggbågen.



4) Passa sen in skruven i det gängade hålet på bålstödsfästet.



5) Drag åt skruven ordentligt med insexnyckel 4 mm.



6) Placera sen överfallet över röret på ryggbågen.

# panthera®



7) Montera den försänkta skruven i det gängade hålet.



8) Drag åt skruven ordentligt med insexnyckel 4 mm.



9) Montera bålstödet i fästet, justera in bålstödet till önskad höjd och drag sen åt vredet. Upprepa proceduren på andra sidan om ett vänster bålstöd också ska monteras. Avsluta med att montera tillbaka rygglädseln.