

Monteringsanvisning för fällbara fotplattor

Så här monterar du dina fällbara fotplattor:

1. Kolla visuellt så att du får rätt platta på rätt sida (vänster/höger). På ett par fotplattor, finns det en höger och en vänster. Skillnaden är att plattans vinkel är "spegelvänd" på dessa.

2. Trä på ändpropparna (5) på ramens rörändar.
Detta på samma ställe som fotbågen normalt sitter.

3. Stick sedan in fotplattans rör (1) i ramen.
Du har 5 st alternativa hål för olika höjd att välja på. Se bara till att du använder samma höjdhål, både på höger och vänster sida.

4. Dra sedan fast med samma skruv som fotbågen suttit med.

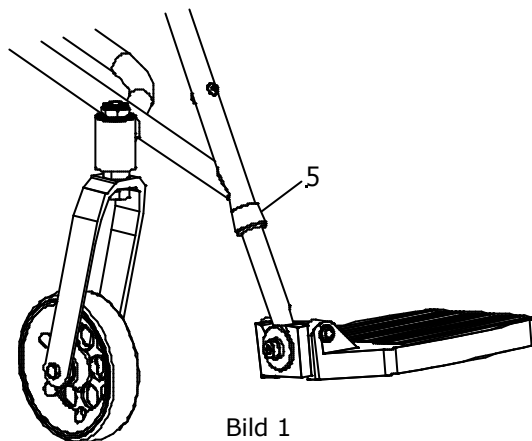


Bild 1

Justera plattans vinkel:

1. Detta gör du genom att först skruva ut stoppskruven (3) på ledklossens (2) sida, med insexnyckel NV2,5. Denna skruv skall vara lossad och utskruvad så att änden är åtminstone jämn med ledklossens yta. När du får plattan från oss, är denna skruv inte åtdragen första gången.

2. Efter att ha lossat stoppskruven, lossar du ledklossens centrumbult (4), med insexnyckel NV5 (denna nyckel har du med bland rullstolens originalverktyg).
Du kan sedan vrida plattan till önskad vinkel.

Dra sedan åt:

1. Först ledklossens centrumbult. Denna drar du åt hårt.
2. Sedan drar du in stoppskruven tills du känner att det tar emot.
Du drar sedan ytterligare 1-1,5 varv. Stoppskruven "sjunker då in" i plasten, och ser till att plattan inte kan vridas så att vinkeln ändras.

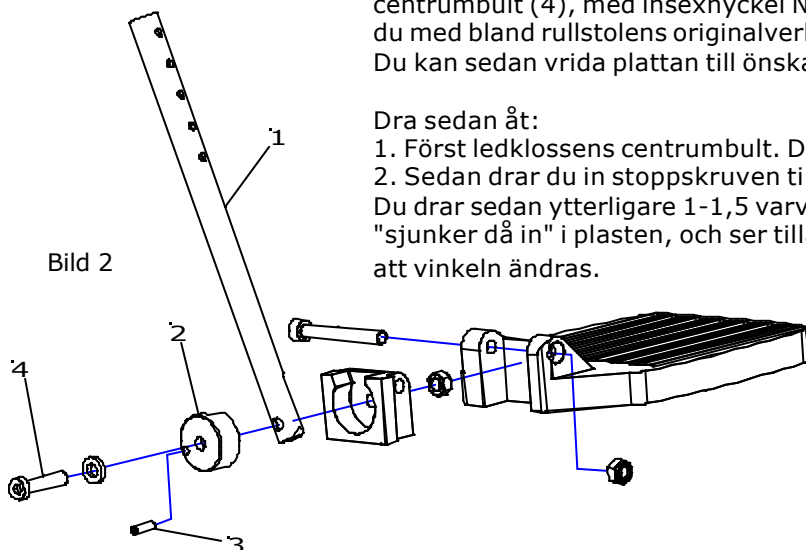


Bild 2

OBS! Stoppskruven nr 3, är ej åtdragen när du får plattorna av oss.
(se "justera plattans vinkel" hur du gör)