

Monteringsanvisning för fast fotplatta

Så här monterar du din fasta fotplatta:

1. Placera klämma (2) och klämma (3) runt rullstolens chassirör enligt **bild 1**.

2. Tag fotplattan (1) och för i bultar (4 och 5) och brickor (6) i de främre eller bakre hålen på sidan av fotplattan, beroende på hur långt fram du vill ha den.

3. Skruva sedan fast fotplattan runt chassiröret med hjälp av bricka (6) och mutter (7). Skruva fast bultarna lätt.

4. Gör enligt ovan på fotplattans andra sida.

5. Eftersom du skruvat i bultarna lätt, kan du nu ställa in fotplattan i höjdled. För fotplattan upp och ner till du hittar ett bra läge som passar dig.

6. Skruva sedan åt bultarna ordentligt.

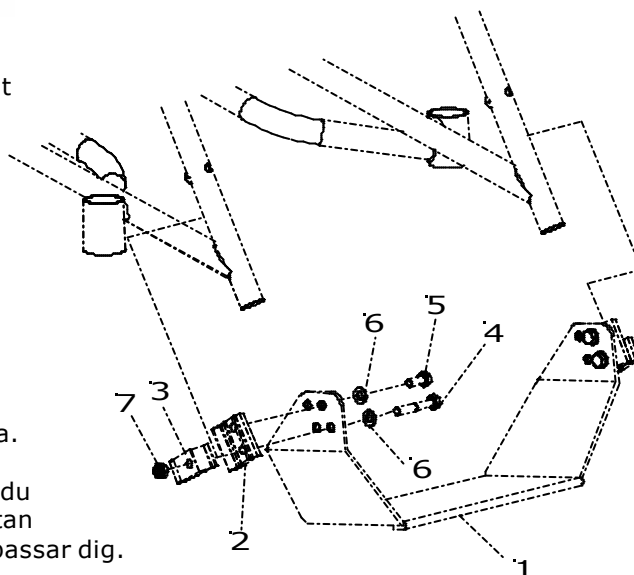


Bild 1

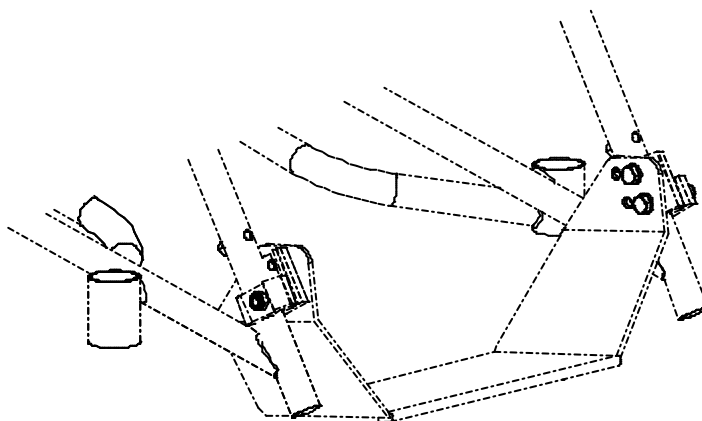


Bild 2