

## Monteringsanvisning för fotplatta Micro

Så här monterar du fotplatta Micro:

1. Placera "fästplåt fotplatta" (2) intill fotplattan (1) och trä brickor (3) och bultar (4 och 5) enligt **bild 1**.

2. Tryck in bultarna genom fästörönen på stolens chassi.

3. Trä på brickor (3 och 6) på bultarna och skruva åt muttrarna (7) ordentligt.

4. Gör likadant på andra sidan.

**OBS!** Du kan justera höjden på fotplattan genom att fästa den i olika lägen på "fästplåten" (2).

