

Monteringsanvisning

Freewheel på Bambino



För att kunna använda Freewheel på Bambino så behöver man ett monterings-kit till fotplattan. (art.nr. **2600103**)
Monterings-kitet består av dessa delar (OBS! Fotplattan ingår ej):

Pos.	Benämning	art.nr.	antal
	Freewheel standard	2600102	1
2	Styrklack Freewheel	2602050	1
3	Fästklack Freewheel	2602051	1
4	Bult MF6S M5x14 Försänkt insex fzb	6007514	2
5	Bult MLC6S M6x16 fzb	6002617	4
6	Bricka BRB stål 6,4x12 fzb	8000612	8
7	Fäste fotplatta Bambino	4380105	2
8	Klämma enkel basket	4601120	2
9	Gångjärnsklämma	4601115	2
10	Bult M6S 88M6x55 fzb	6001655	2
11	Mutter DIN 985 M6 fzb låg nylock	7000060	2

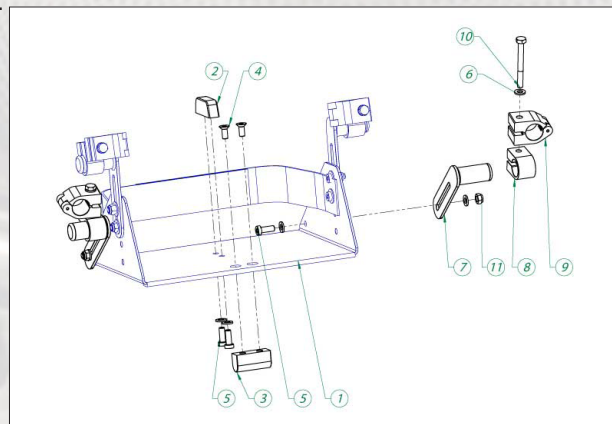


Fig. 1

Börja med att lossa fotplattan från Bambino och borra nya hål i plattan enl. fig. 2 nedan. Mått i mm.




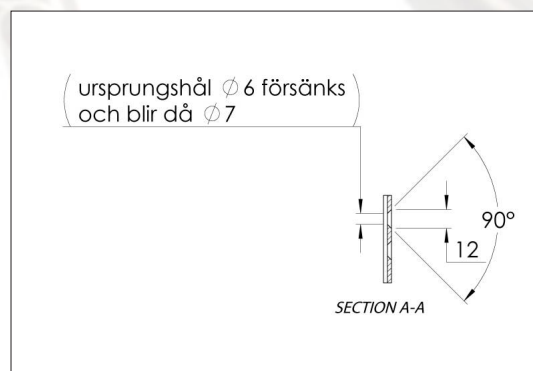


Fig. 2

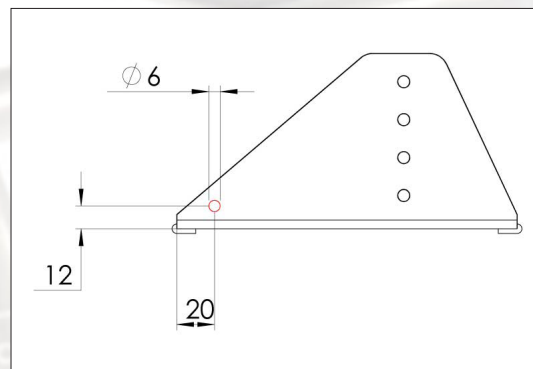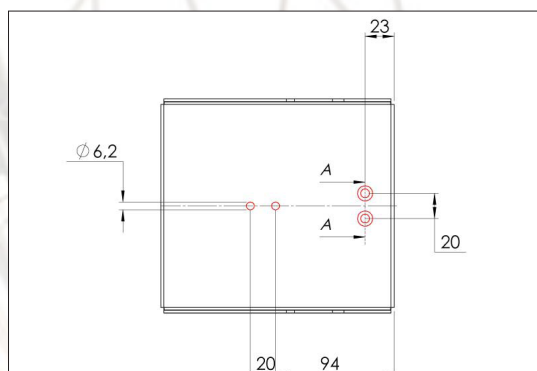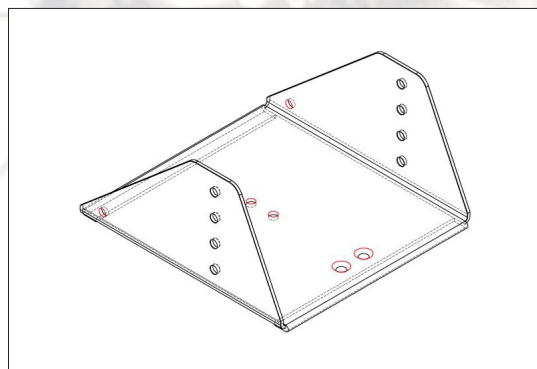

Montera sen styrklack (2) resp. fästklack (3) enl. fig.1 och 3 på fotplattan. Montera sen tillbaka fotplattan på Bambino och montera sen dit de två extra förstärkningsstagen på båda sidor om fotplattan (delarna 6, 7, 8 ,9 ,10 ,11) enl. fig. 4. Del 9 ska monteras runt chassi röret på Bambino, enl. fig. 5

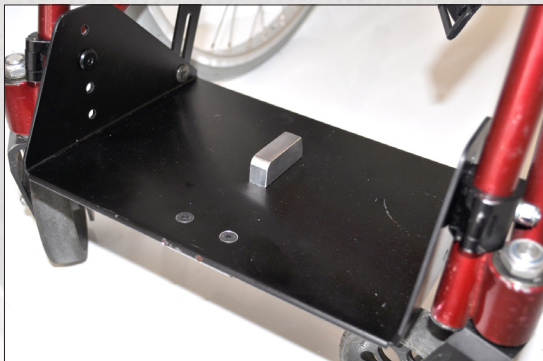


Fig. 3

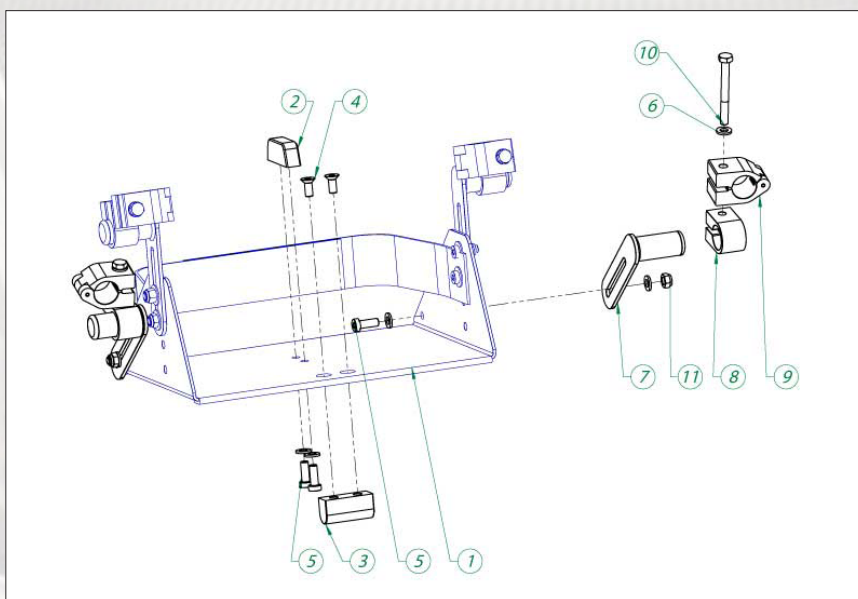


Fig. 4



Fig. 5



När fotplattan sitter på plats så är det dags att montera Freewheel och trimma in den enl. bruksanvisningen.

