

Monteringsanvisning för körbåge

Så här monterar du en körbåge:

1. Börja med stolen. Lätta på rygglädseln och ta bort ändpropparna på ryggens övre del (**bild 1**).

2. Lägg stolen på sidan.

3a. Om du har en **Bambino (bild 3)** så finns det en låskloss i ryggförlängaren som är istuckad i ryggstativet. Justera denna låskloss så att dess hål ligger jämnt med hålet på ryggstativet.

3b. Om du har en **S2 eller U2 (bild 4)** så tar du låsklossen (3) som finns med i monteringssetet och stoppar ner i ryggstativet. Justera denna låskloss så att dess hål ligger jämnt med hålet på ryggstativet.

4. Ta sedan körhandtagsfästet (2) och den korta bulten (6) med en bricka (8). Stick in bulten i fästet och skruva fast bulten i låsklossen som sitter i ryggroret (**bild 2**). Dra bara åt bulten lätt. Nu kan du sätta dit ändproppen i ryggroret igen.

5. Lägg gångjärnsklämman (4) runt ryggbågen och stick in den långa bulten (7) med en bricka (8) genom klämman och körhandtagsfästet (2). Dra åt lätt.

6. Montera körbågen (1) i fästet genom att trycka in "knappen" på bågens nedre del och sticka in den i fästet. Justera med körbågen så att fästet sitter rakt.

7. Dra nu åt den första bulten (6) hårt (**bild 2**), och därefter den andra bulten (7).

8. Dra åt snabblåset (5) så att körbågen sitter fast .



Bild 1

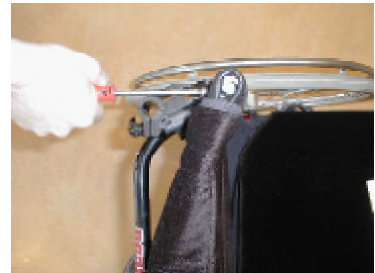


Bild 2

Bild 3. Bambino

Bild 4. S2 och U2

