

## Monteringsanvisning för körhandtag H/S

Så här monterar du höj- och sänkbara körhandtag:

1. Börja med stolen. Lätta på ryggklädseln och ta bort ändpropparna på ryggens övre del (**bild 1**).

2. Lägga stolen på sidan. Stick in låsklossen i ryggröret (där ändpropparna satt) så att hålen på ryggen och låsklossen stämmer överens.

3. Ta sedan körhandtagsfästet och den korta bulten med en bricka. Använd någon form av gängsäkring på bulten för att förhindra att den gängas upp och sitter löst. Panthera rekommenderar Loctite 243 eller motsvarande, **se bild 5**. Stick in bulten i fästet och skruva fast bulten i låsklossen som sitter i ryggröret (**bild 2**). Dra bara åt bulten lätt. Nu kan du sätta dit ändproppen i ryggröret igen.

4. Lägga gångjärnsklämman runt ryggbågen och stick in den långa skruven med en bricka på genom klämman och körhandtagsfästet (**bild 3**). Använd någon form av gängsäkring på bulten för att förhindra att den gängas upp och sitter löst. Panthera rekommenderar Loctite 243 eller motsvarande, **se bild 5**. Dra åt lätt.

5. Montera körhandtaget i fästet genom att trycka in "knappen" på handtagets nedre del och sticka in den i fästet (**bild 4**). Justera med handtaget så att fästet sitter rakt.

6. Dra nu åt den första bulten hårt (**bild 2**), och därefter den andra (**bild 3**).

7. Dra åt snabbblåset så att körhandtaget sitter fast .



Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.

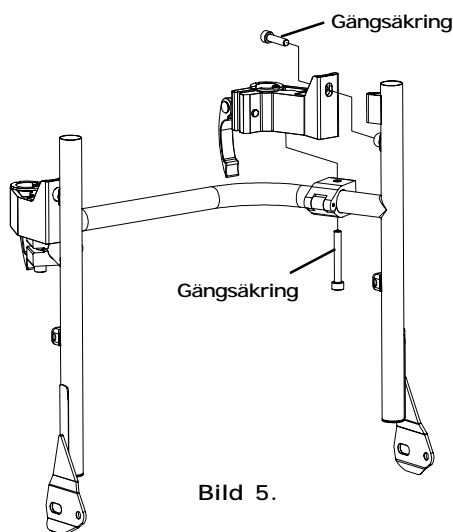


Bild 5.



Bild 4.