

Monteringsanvisning för nav

Så här gör du för att montera isär/ihop ett nav:

1. Tag bort drivhjulet från stolen.
2. Tag en hylsnyckel 20 och en fast skiftnyckel 13. Lägg hylsnyckeln runt navmuttern (1), och skiftnyckeln runt navaxeln (2).
(**OBS!** Lägg skiftnyckeln runt navaxeln där kulorna (3) syns, så att inte axeln snurrar när du drar med hylsnyckeln.)

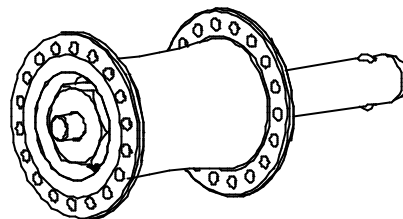


Bild 1

3. Lossa navmuttern (1).
4. Dra sedan ut navstången (4) och fjädern (5).
(**OBS!** Var försiktig så att du inte tappar bort kulorna (3) när du drar ut navstången (4).)
5. Tag sedan ett dorn en gammal navaxel eller något liknande, och slå på änden av navaxeln (2). Du kommer då att slå ut navaxeln (2), en segersäkring (6), ett lager (7) och två stycken kupade brickor (8).
6. Du kan nu slå loss lagret (7) från navaxeln (2) och ta bort segersäkringen (6). Du kan nu även ta bort den segersäkring (använd en spärringstång) och det lager som sitter kvar i navhylsan (9).
Se bild 2.



Bild 2

7. Byt nu de detaljer som skall bytas.

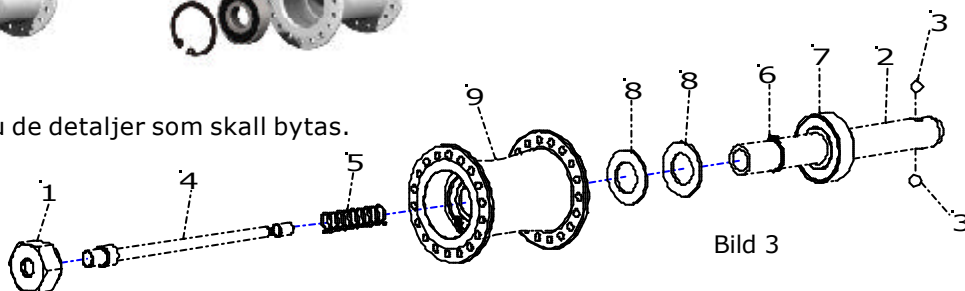


Bild 3

8. När du sedan skall montera ihop navet igen, se till att den lilla segersäkringen (6) och ett lager (7) sitter på navaxeln (2).
9. Om du har tagit bort den stora segersäkringen och lagret som satt kvar i navhylsan (9), sätt tillbaka dessa.
10. Lägg in de båda kupade brickorna (8) i navhylsan (9). Se till att kupningen på brickorna kommer mot varandra, så att brickorna ej "ligger i" varandra. **Se bild 4.**
11. För in navaxeln (2) i navhylsan (9) i det utförande som står i punkt 8, och slå fast lagret (7) i navhylsan (9).
12. För sedan in fjädern (5) och navstången (4) in i navaxeln (2).
13. Pilla sedan in kulorna (3).
14. Dra åt navmuttern (1). (Gör enligt anvisningen i punkt 2.)

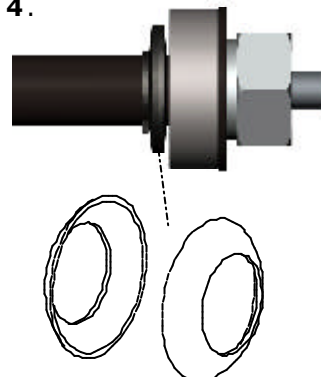


Bild 4