

panthera

Sida 1/1

Monteringsanvisning för sitsväska

Så här gör du för att montera din sitsväska:

1. När sitsväskan levereras till dig så ligger väskan (**se bild 1**) tillsammans med ett löst kardborreband.

2. Fäst ett kardborre som sitter på sitsväskan på kardborret på översidan av sitsen (under dynan).

3a. Om du har en standardstol, eller en U2 utan enhandsbroms, skall du fästa sitsväskans andra kardborre på det kardborre som finns på undersidan av din sits. **Se bild 1.**

3b. Om du har en U2 med enhandsbroms, skall du fästa det lösa kardborret på chassiröret enligt **bild 2**, och fästa sitsväskans andra kardborre på det.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

panthera

Panthera Production AB
Gunnabogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se