

Monteringsanvisning för Spoxhjul std

(på stol med standardbakaxel)

OBS! Denna monteringsanvisning gäller endast stolar med standardbakaxel. Alltså ej våra vuxenstolar i bredd 45, eftersom det är standard med camberaxel på dessa stolar.

Så här gör du för att montera Spoxhjul:

1. För att spoxhjulets nav inte ska ta i muttern (1) på bakaxeln, så måste man ha distanser (2) till mutterstycket (3). Beroende på vilken typ av sidoskydd eller armstöd det är på stolen, så måste man ha olika typer av mutterstycken (3) och distanser (2). **Se bild 1.**
2. Om man har en stol utan sidoskydd eller med "sidoskydd plast", så ska man använda kombinationen i **bild 2**. Alltså en 16 mm distans (2a) och ett "mutterstycke standard" (3a).
3. Om man har en stol med "sidoskydd med skärm" eller med "armstöd", så ska man använda kombinationen i **bild 3**. Alltså en 12 mm distans (2b) och ett "mutterstycke förlängt 7mm" (3b).
4. Börja med att lossa lite lätt på M10-muttern (1) och skruva sedan bort mutterstycket (3).
5. Byt ut distansen och mutterstycket till rätt kombination.
Läs punkt 2 och 3 ovan, och se bild 2 och 3.
6. Gör detta på båda sidor av stolen.

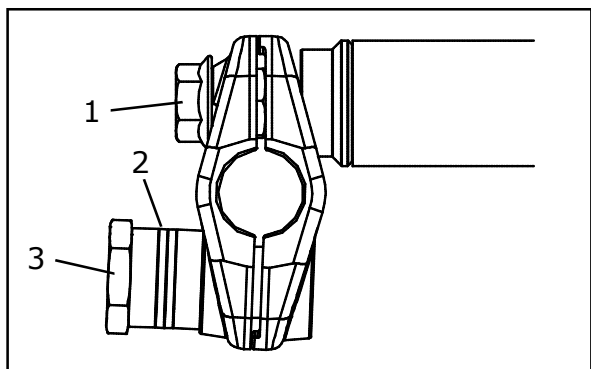


Bild 1.

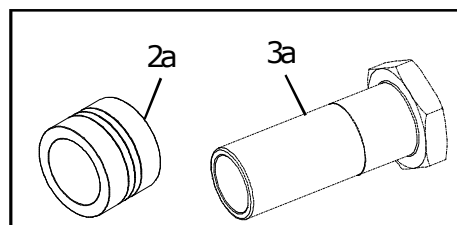


Bild 2. Distans 16 mm och mutterstycke std - om det är "sidoskydd plast" eller inga sidoskydd på stolen.

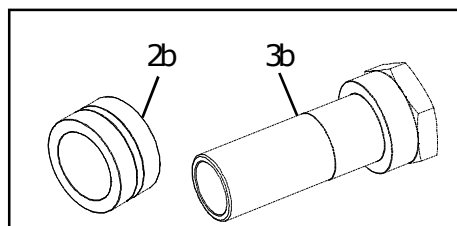


Bild 3. Distans 12 mm och "mutterstycke förlängt 7mm" - om det är "sidoskydd med skärm" eller "armstöd" på stolen.

7. Dra sedan åt mutterstyckena (3) på båda sidor, och sist drar du åt M10-muttrarna (1).

8. Nu är du klar att sätta på Spoxhjulen. Montera navaxeln (4) och distansen (5) enligt **bild 4** på hjulet innan du sätter på det på stolen.

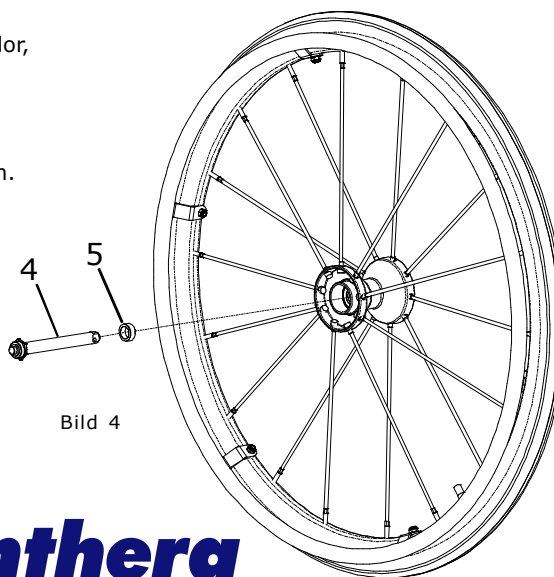


Bild 4