

TIPPSKYDD S3 / BAMBINO 3



Demontering / Monteringsanvisning för:
Tippskydd S3; Bambino 3


art.nr. 4353000, 4353030, 4353060, 4353080
art.nr. 4351001 Bambino 3

Verktyg som behövs:
Specialverktyg från Panthera, art.nr. 4903003
Insex 2,5mm
Insex 5 mm
Borr 6 mm


DEMONTERING



1) DEMONTERING
Börja med att lossa vredet med insex-
nyckel 2,5 mm.

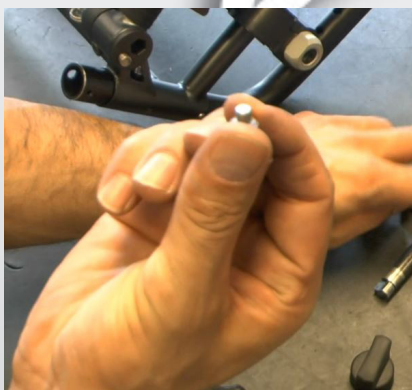

2) Tag fram låsniten som följer med de
nya tippskydden. Den används för att
låsa den fjäderbelastade hylsan inne i
tippskyddet i utdraget läge.

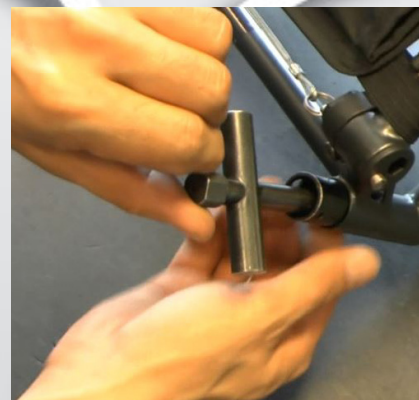

3) Tag fram specialverktyget och stoppa
ned i det i tippskyddet och genom att
vrida på knoppen haka fast fjäderbelas-
tade hylsan och lyft upp den. Har man
inte specialverktyget kan man även lirka
upp fjädern med t.ex. en gammal hjule-
ker. [LÄNK](#)



4) I utdraget läge så placera låsniten i
hålet när hylsan är utdragen. När den
fjäderbelastade hylsan är låst i utdraget
läge så tag bort specialverktyget.




5) Lossa och tag bort tippskyddets lås-
skruv..



6) Drag loss tippskyddet från ramen.

Upprepa samma procedur 1-6 på det an-
dra tippskyddet.

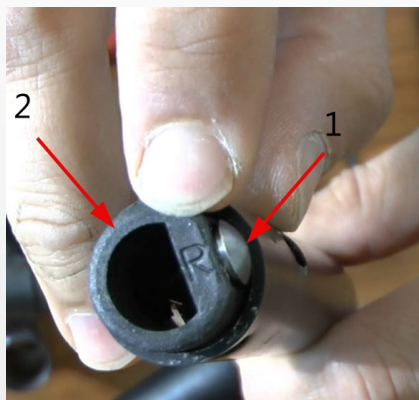


1) MONTERING

Tag fram det nya tipskyddet och observera att tipskydden är märkta med "R" för höger och "L" för vänster sida. Använd en nit (1) eller skruv för att låsa hållaren (2) i utdraget läge.



2) För in tipskyddet i sitt fäste i ramen.

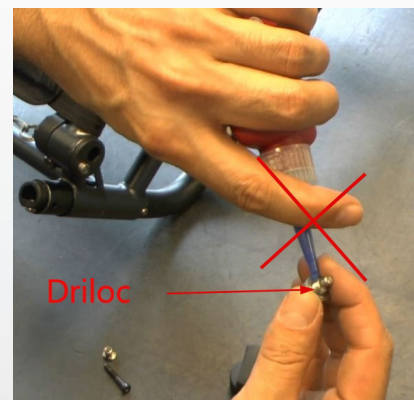


3) Låsskruven till tipskyddet är förbehandlad med "Drilloc", vilket betyder att man inte behöver applicera Loctite på skruven innan montering.



4) Drag åt skruven som låser tipskyddet i ramen ordentligt.



5) Tag fram specialverktyget och använd det för att lyft upp hylsan. När den är utdragen så pilla bot låsniten och släpp ner hylsan i tipskyddet. Har man inte specialverktyget kan man även lirka upp fjädern med t.ex. en gammal hjuleker. [LÄNK](#)

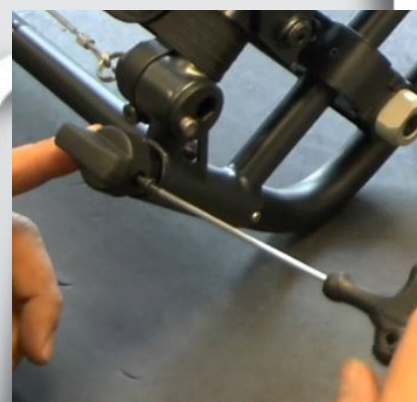

6) Montera tillbaka vredet på tipskyddet och skruva åt. Upprepa procedur 1-6 på det andra tipskyddet.

Montering på Bambino 3, S3 Kort Låg, S3 Swing Låg 0°

På dessa modeller sitter låsskruven monterad bakifrån på chassit. För att tipskyddet ska kunna svängas in i sitt spår måste man montera höger tipskydd på vänster sida och tvärtom.

Bambino 3 har som standard ett slätt vred upptill (fig.7). Önskar man S3 vredet (fig 8) monterat på Bambino och på övriga låga modeller behöver man anpassa tippörret för att vredets riktning ska bli rätt. Tippörret har ett hål på vardera sida på 5 resp, 6 mm. För att kunna montera vredet rätt måste man borra upp det mindre hålet till 6 mm (fig 9) Därefter kan man montera vredet i rätt position med "piggen" pekandes utåt, när tipskyddet är i utfällt läge.



7) Bambino 3 har som standard ett slätt vred upptill. Låsskruv monterad bakifrån på chassit på dessa modeller.



8) Önskar man montera S3 vredet på dessa modeller måste man anpassa tippörret för att vredet ska peka åt rätt håll,.



9) Tippörret har ett hål på vardera sida på 5 resp, 6 mm. För att kunna montera vredet rätt måste man borra upp det mindre hålet till 6 mm. Det högra är uppborrat till 6 mm.



9) Vredet ska pekar åt rätt håll, med "piggen" utåt, med utfällda tipskydd och inåt vid infällda.