


BAMBINO TIPPSKYDD

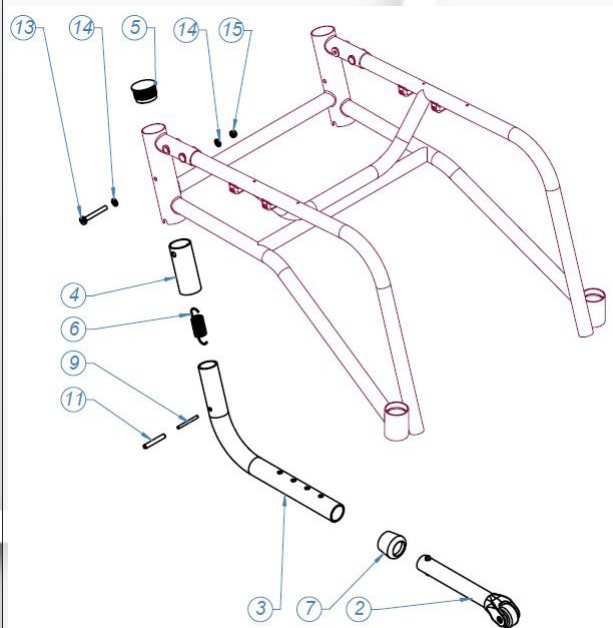

1. Börja med att skruva fast "Bussning tippskydd" (4), med hjälp av skruven (13) de två brickorna (14) och muttern (15).

2. Haka sedan fast fjädern (6) enligt fig i "spiralspännstiftet" (11).

3. Haka fast samma fjäder i skruven (13). Du behöver ett långt verktyg. För t.ex en eker eller något liknande genom det bakre chassiröret (ovanifrån), haka fast fjädern på ekern, och spänn upp fjädern på skruven.

4. Kolla så att fjädern sitter fast ordentligt genom att dra i tippskyddet och fäll det fram och tillbaka.

5. Om allt sitter som det ska så trycker du i "Ändproppen" (5).