

Monteringsanvisning för tippskydd

Så här monterar du ditt tippskydd:

1. Börja med stolen. Ta bort skruvarna som håller ändpropparna på chassits bakre rör. Tag därefter bort propparna.

2. Stick in konfästet i chassit. (se bild 1) (där ändpropparna satt). Dra åt skruven måttligt så att konfästet sitter fast (använd insexnyckel 5 mm). Sedan kontrollerar du att konfästet sitter rakt. Detta kan du göra genom att hålla tippskyddet över konfästet, och se om detta sitter lodrätt. Om det inte sitter lodrätt kan du använda tippskyddet för vrida konfästet rätt (se bild 2). Sedan efterdrar du konfästet hårt.

3. Ta sedan den övre klämman, och sätt den runt röret. Sätt i den korta bulten (nr 2 i bild 4) med en bricka, och skruva på en mutter och en bricka på insidan för hand.

4. Håll sedan ihop övre klämman med den ena handen, och trä över tippskyddet med den andra (se bild 3). Trä sedan i en bult och en bricka i det övre hålet (bult 1), och skruva på en mutter och en bricka på insidan för hand.

5. Sedan monterar du nedre en bricka och en bult (bult 3), genom konfästet, och en mutter och en bricka på insidan för hand. (se bild 4).

6. Dra sedan åt alla bultarna lite lätt (använd fasta nyckeln nr 10), samtidigt som du kontrollerar att den övre klämman inte "kantställer sig". Sedan kan du dra åt bult 1 och 3 hårt. Du avslutar med att dra åt bult 2 måttligt. Bult 2 skall inte dras stenhårt.

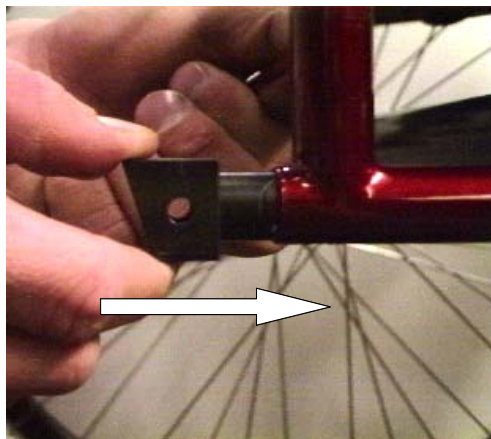


Bild 1

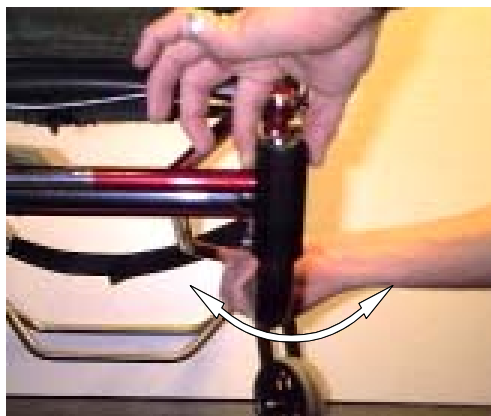


Bild 2



Bild 3

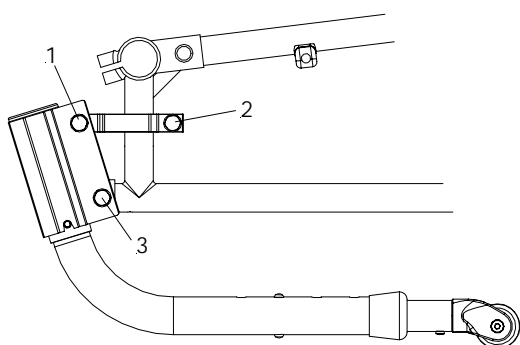


Bild 4

Var god vänd sida!

panthera

Panthera Production AB
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se

Monteringsanvisning för tippskydd

Justering och användning av tippskyddet:

1. Aktivt läge. I utfällt läge justeras lämplig markfrigång in genom att sätta hjulröret i ett av de fem positionerna. (se bild 5).
2. Transportläge. Tippskyddet kan fällas in under ramen. Detta gör du genom att trycka ned tippskyddet och vrid det in under sitsen (se bild 6). När du sedan fäller ut tippskyddet se till att tippskyddet "åker upp" i lås spåren.

Tips:

För att lära sig bakhjulskörning bör man ha tippskydden inställt i sådant höjdläge att möjlighet ges att få upp stolen i balansläge. **"Kör hårt och träna mycket"**



Bild 5

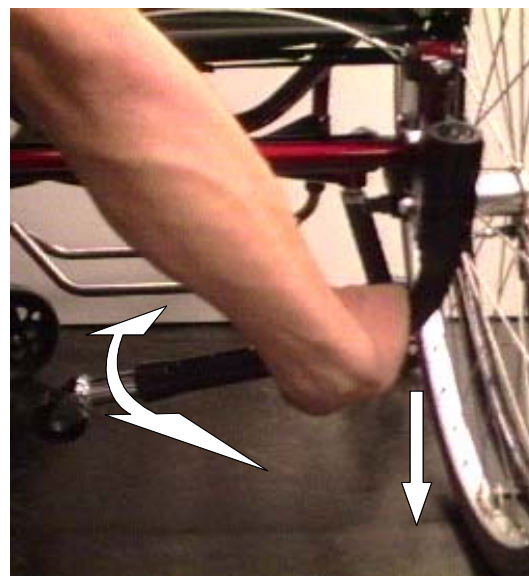


Bild 6