

Monteringsanvisning för sänkt enhandsbroms U2

Så här gör du för att sänka din enhandsbroms:

1. Montera bort bromsen från din stol.
2. Börja på den sidan på bromsen där bromsspaken sitter. Ersätt de bultarna på din broms med bultar (3 och 4) enligt **bild 1**.
3. Innan du skruvar åt de nya bultarna, placera även distanser (1) och brickor (2) på rätt ställe enligt sprängskissen. **Bild 1**.
4. Dra åt bultarna på denna sidan av bromsen.
5. Fortsätt sedan med bromsens andra sida. **Se bild 2**.

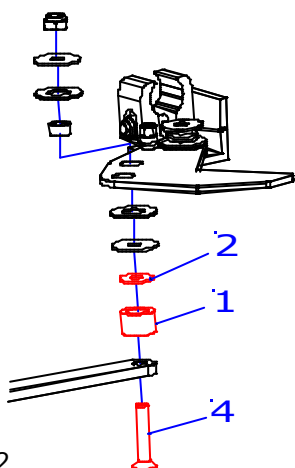
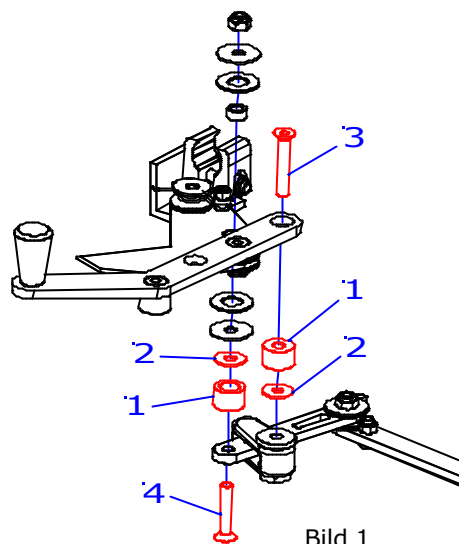


Bild 2

6. Lossa även här på bulten och ersätt den med en ny (4), och lägg mellan en distans (1) och en bricka (2).

7. Dra åt den nya bulten.

8. Den sänkta bromsen skall se ut som **bild 3**.

9. Montera fast din broms på din stol på samma sätt och i samma läge som du hade den tidigare.

Dessa detaljer ingår i sänkningskit för enhandsbroms:

Sänkningskit enhandsbroms U2 366 00 70

1. 3 st Mellanbussning	443 00 51
2. 3 st Bricka 16x6x1	800 06 16
3. 1 st Bult MF6S M6x35	600 76 35
4. 2 st Bult MF6S M6x30	600 76 30

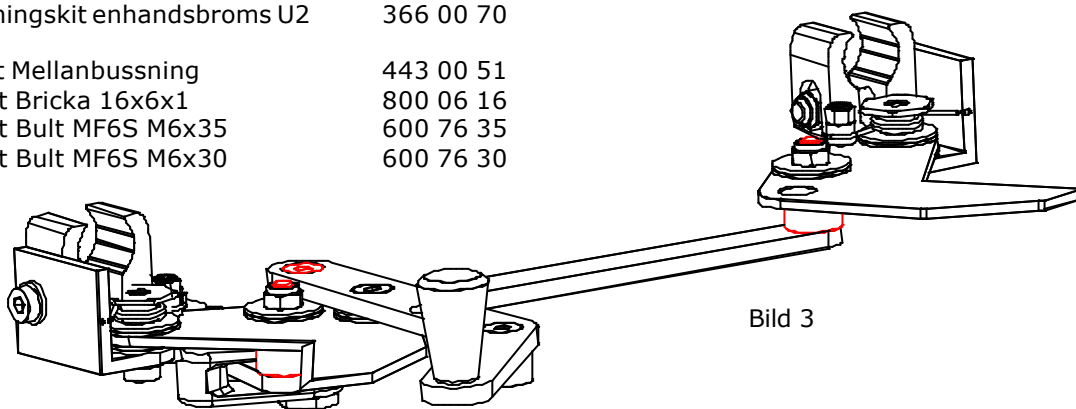


Bild 3