

Monteringsanvisning för hälband

Följande delar behövs för att montera ett hälband:
1st hälband höger/vänster, 1st pinne, 1st skruv
och 1st självhäftande kardborre.

Så här monterar du hälbandet på fotplattan:

1. Börja med att borra ett genomgående hål med diameter 5 mm i det runda urtaget på undersidan av fotplattan, se bild 1.
2. Sätt i pinnen i hälbandet. Håll pinnen ovanför hålet på ovansidan av fotplattan och skruva i skruven från undersidan av fotplattan, se bild 2.
3. Prova fram lämplig höjd för hälbandet på chassiröret, se bild 3.
4. Lossa hälbandet.
5. Montera den självhäftande kardborren på chassiröret där hälbandet ska hamna.
6. Sätt fast hälbandet. Klart!



Bild 1

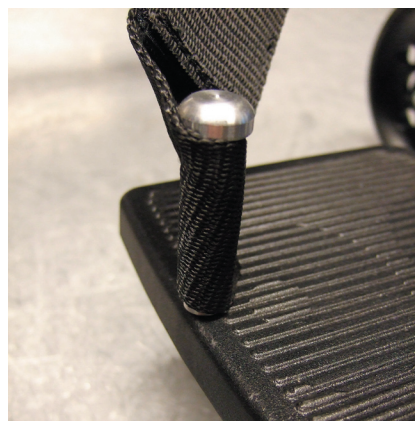


Bild 2

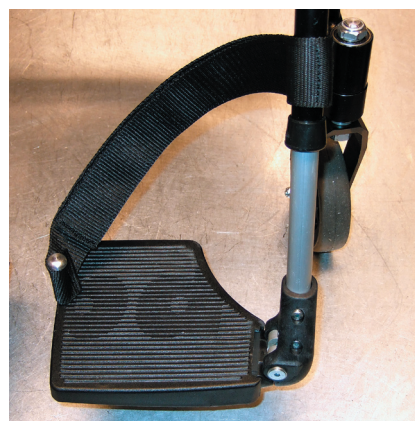


Bild 3